

Dati tecnici


Modello		Ruote	Art. No.	Peso	Portata max.
Mirto	Sedia da doccia e comodo	5 inch	01247	12,5 kg	130 kg
Cascara	Sedia da doccia e comodo	5 inch	40280	15,9 kg	130 kg
Bardana	Sedia da comodo	5 inch	40230	14,5 kg	130 kg
New York	Sedia da doccia e comodo	5 inch	01219	15,7 kg	150 kg
Boston	Sedia da comodo	5 inch	01750	15,0 kg	150 kg

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso!

Dimensioni

Dimens. (ca.)	130 kg	150 kg
A. altezza	101 cm	104 cm
B. larghezza	56 cm	62cm
C. profondità	87 cm	89 cm
D. altezza sedile	53-55 cm	53-55 cm
E. larghez. sedile	46 cm	52 cm
F. profund. sedile	45 cm	45 cm
G. altezza da terra	43/47 cm	44/47 cm
H. altezza ruote	12.5 cm	12.5 cm

Diagramma

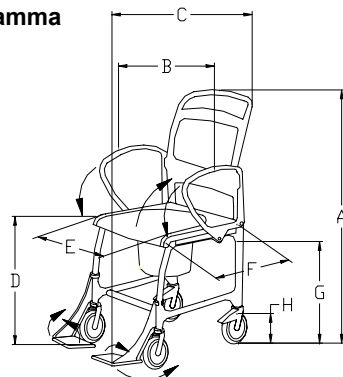

Avviso

Conservate sempre il manuale utente per uso futuro.

Il numero di serie sul manuale è stampato anche sull'etichetta del prodotto. In caso di reclami citate il modello e il numero di serie.

Riutilizzo (Noleggio)

Vi rimandiamo alle normative apposite. Il riutilizzo dipende dalle condizioni del prodotto. Prima del riutilizzo eseguire un controllo generale del prodotto, osservando le relative istruzioni di manutenzione e cura. Questo controllo deve evitare un utilizzo non regolamentare a causa di danni direttamente evidenti o possibili.

Vita del prodotto

La durata attesa dei prodotti qui descritti è, in caso di impiego conforme alle istruzioni, rispetto delle norme di sicurezza, della frequenza di manutenzione e pulizia, di **dieci anni**. Dopo questo arco di tempo è possibile utilizzare il prodotto solo se questo si trova in condizioni sicure. Al proposito si dovrebbe effettuare un intervento di manutenzione almeno ogni 6 mesi. In caso di utilizzo particolarmente frequente del prodotto, l'intervallo tra gli interventi di manutenzione dovrebbe essere più breve.

Garanzia

La garanzia è di **24 mesi** per le sedie sia da comodo che da doccia. Si escludono le parti soggette ad usura e i danni causati da utilizzo improprio. Per vostra sicurezza e validità della garanzia le riparazioni possono essere effettuate solo da CHINESPORT Spa. Impiegare esclusivamente pezzi di ricambio originali.



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
Manuale utente

BA No.: 04.07.058/11-09



CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 – 33100
UDINE (Italy)
Tel. ++39 0432 621621
Fax ++39 0432 621620
www.chinesport.it

N. Serie / Prodotto



Sedie da doccia e da comodo

Sedia da doccia e comodo "Berlin" Art. No.: 01821/ 130 kg

Sedia da comodo "Bonn" Art. No.: 01813 / 130 kg

Sedia da doccia e comodo "Erfurt" Art. No.: 01817 / 130 kg



Sedia da doccia e comodo "New York" Art. No.: 01219 / 150 kg

Sedia da comodo "Boston" Art. No.: 01750 / 150 kg



Usso previsto

Le sedie da doccia e da comodo devono essere utilizzate in casa o in strutture di ricovero. Servono ad agevolare persone disabili (impossibilitate a camminare o con capacità motorie limitate) aumentandone l'indipendenza nel fare la doccia o nella toilette. Non ostante l'ottimo comfort, non sono concepite perchè il paziente vi resti seduto molto a lungo.

Sedie da doccia

Possono essere usate in ambienti umidi!

Le sedie doccia possono essere usate quando i problemi fisici del paziente non rendono più possibile il normale uso della doccia o della vasca. La doccia deve essere realizzata in modo che la sedia a rotelle possa entrarvi. Le sedie doccia hanno un telaio resistente alla corrosione con 4 ruote in gomma, di cui 2 o 4 bloccabili. I braccioli possono essere rovesciati e le pedane tolte o ripiegate. Lo schienale e la seduta sono resistenti all'acqua. Schienale e seduta di alcuni modelli sono imbottiti.

Sedie da comodo

Non possono essere usate in ambienti umidi!

Le sedie da comodo possono essere usate quando i problemi fisici del paziente non rendono più possibile il normale uso della toilette. Le sedie da comodo hanno un telaio rivestito in plastica con 4 ruote in gomma, di cui 2 o 4 bloccabili. La seduta ha una apertura ad uso igienico, sotto la quale può essere inserito un vaso toilette. Le sedie da comodo possono anche essere semplicemente spinte sopra le più comuni toilette.

Sedie da doccia e da comodo

Consistono in una combinazione delle due precedenti. Possono essere usate negli ambienti descritti sopra.

Cura e manutenzione (Manuale di manutenzione BA No.: 04.10.071-I)

La sedia può essere pulita con un detergente/disinfettante comunemente in commercio – seguite le istruzioni. Tutte le parti mobili sono autolubrificanti. Controllate la sedia ogni volta prima dell'uso. Controllate che tutte le viti siano ben strette (specialmente quelle delle ruote). Controllate anche che i depositi di calcio non limitino la funzionalità della sedia (pulire se necessario!).

Una manutenzione inadeguata o negligente limita le responsabilità del costruttore!



Possibili cause di incidenti:

- **Usura non riscontrata per tempo.**
- **Danni causati da utilizzo improprio.**

Per sicurezza e prevenzione, fate controllare la vostra sedia dal vostro rivenditore **almeno una volta all'anno.**



Istruzioni di sicurezza

- **Le sedie non sono adatte a trasportare pazienti per lunghi periodi.**
- Inserite sempre il freno per evitare che la sedia si muova, anche se non è in uso!
- Sollevate sempre i supporti piede prima di salire o scendere dalla sedia. Non saliteci mai sopra in piedi.
- Usate la sedia solo quando i braccioli sono ben posizionati e bloccati.
- **Pericolo di ribaltamento!** La sedia può essere spinta solo tramite la maniglia.
- Usate la sedia solo su superfici solide e piane.
- **Pericolo di ribaltamento!** Non spingete la sedia contro la soglia di una porta o lo zoccolo di una superficie.
- Spingete la sedia sempre ad una velocità moderata.
- **Pericolo di ribaltamento!** Non sporgetevi in avanti dalla sedia. In certe posizioni delle ruote (girate all'interno) la stabilità è limitata. **Non trasportate la sedia con una persona in carico sopra.**

Istruzioni di assemblaggio

Il prodotto viene fornito non completamente montato. Prima dell'utilizzo, eseguite queste operazioni (vedi diagramma pag. 4):

1. Ribaltate i braccioli all'indietro e inserite lo schienale nei tubolari d'acciaio della sedia. Spingetelo in basso fino a che non raggiunge si blocca sulla struttura inferiore.
2. Ruotate in avanti i braccioli finché non collimano con lo schienale e i perni non scattano nei fori della parte inferiore della struttura.
3. Ruotate in avanti le pedane finché non scattano in posizione.
4. Abbassate i supporti piedi.

Primo impiego

La sedia è ora pronta all'uso. Al momento del primo impiego assicuratevi che:

Ribaltare i braccioli

Tirando verso l'esterno il perno viene rilasciato il blocco ed è possibile ribaltare all'indietro il bracciolo. Quando il bracciolo è nuovamente in posizione normale verificate che il perno e il fermo sullo schienale si trovino correttamente nella loro sede. Eseguite ad intervalli regolari controlli sul meccanismo di bloccaggio, poichè eventuali depositi di calcare potrebbero impedire l'entrata/uscita del perno.

Regolazione dell'altezza dei poggiatesta

I poggiatesta sono regolabili in altezza (7 posizioni). Svitare le viti laterali sui supporti piede con una chiave Imbuss (SW6). Scegliete l'altezza desiderata e riavvitare nuovamente. Fate attenzione a stringere adeguatamente le viti.

Estrarre le pedane

Rimuovete innanzitutto la seduta. Sollevare le pedane di 10 cm (fin sopra la barra orizzontale della struttura) e ruotate di 90° all'esterno. Ora potete sollevare del tutto le pedane e quindi estrarle.

Rimuovere la seduta

Con una mano spingete verso il basso la sedia premendo sul bracciolo. Con l'altra sollevate la seduta finché non raggiunge lo schienale. La seduta si libera così dal meccanismo bloccante e può essere rimossa.

Blocco ruote

Premete verso il basso la leva (rossa) delle ruote posteriori. Le ruote sono ora bloccate. Potete sbloccare il freno semplicemente sollevando la leva rossa.

Installare il vaso toilette

Inserite il vaso sotto il sedile dal retro della sedia. Per toglierlo, sollevatelo un po' ed estraetelo dal retro. Nei modelli con foro toilette in due pezzi si può inserire/disinserire il vaso anche alzando la seduta forata.

Togliere l'imbottitura dello schienale

L'imbottitura dello schienale è fissata allo schienale stesso con dei bottoncini. Premete i bottoncini, in questo modo l'imbottitura si sgancia e può essere rimossa.