



Modalità di utilizzo del Lenzuolo Comfort Plus

A - Srotolare il lenzuolo e adagiarlo sul letto



B - Far passare le fettucce sotto il letto e assicurarsi che le fibbie in plastica siano chiuse.



(Le fettucce devono comprendere sia la rete che il materasso)

C - Aprire la cerniera e far adagiare il paziente



D - Chiudere la cerniera e il bottone a pressione assicurandosi che il colletto non stringa sul collo del paziente.



E - **A sponde del letto alzate** assicurarsi che il paziente possa effettuare liberamente i movimenti consentiti dal lenzuolo stesso.



N.B.: Il lenzuolo può essere riutilizzato previo lavaggio a temperatura medio/alta (60°C). Al termine della vita il lenzuolo può essere conferito al servizio pubblico di raccolta come RSU. Per effettuare la raccolta differenziata separare le parti in plastica (fibbie).