



Manuale di istruzioni

Codice 9120.20.312

MODELLO AUTOTEST REGENT II

NORME

Questo sfigmomanometro FB soddisfa i requisiti della Direttiva CE – CEE/94/42 (Direttiva sui Dispositivi Medicali) ed è stato progettato in accordo agli standard Europei EN 1060, sfigmomanometri non invasivi parte 1 e parte 2. **CE 0123**. E' un prodotto appartenente alla classe IM (con funzioni di misura), regola 1.

ISTRUZIONI PER LA MISURA DELLA PRESSIONE

- Eliminare completamente l'aria residua nel vostro bracciale ed applicarlo sul braccio sinistro allo stesso livello del cuore.
- Chiudere la valvola completamente, la quale è situata nella parte sinistra del manometro.
- Applicare la testina dello stetoscopio sull'arteria brachiale per l'auscultazione dei toni.
- Gonfiare il bracciale mediante la monopalla.
- Aprire la valvola leggermente; la velocità di rilascio aria deve essere approssimativamente 2-3 mmHg/sec.
- Leggere i valori di pressione sistolica e diastolica sulla scala graduata del manometro.
- Al termine della misura sgonfiare completamente il bracciale aprendo la valvola.

DATI TECNICI

Tipo: sfigmomanometro ad aneroide completo di monopalla e bracciale

Range di misura: 0 – 300 mmHg

Accuratezza: +/- 3 mmHg

Temperatura di esercizio: da +10 °C a + 40 °C

Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a + 70 °C

Divisione: 2 mmHg

PULIZIA

Manometro: utilizzare un panno morbido leggermente umido. Non usare liquidi a base di petrolio, diluenti o solventi similari.

Bracciale: dopo aver tolto la camera d'aria, potete lavarlo fino a 60 °C.

CONTROLLO TECNICO DELL'ACCURATEZZA

Un controllo tecnico del manometro di alta qualità deve essere effettuato almeno ogni 2 anni. Vi preghiamo quindi di contattare il rivenditore autorizzato dalla FB o di inviare il vostro sfigmomanometro direttamente alla INTERMED S.r.l.

DATA DI PRODUZIONE

La data di produzione è stampata sulla scala graduata del manometro e fornisce un'informazione circa la data di produzione e del numero di serie (primi 2 numeri = anno di produzione – terzo numero = trimestre dell'anno)



GARANZIA

Friedrich Bosch GmbH & Co. KG offre per il sopramenzionato strumento una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto dal vostro rivenditore. La garanzia copre tutti i difetti per materiale difettoso o di produzione- con eccezione delle parti in gomma ed elettroniche – ma non copre guasti dovuti ad uso improprio. Il certificato di garanzia, compilato dal rivenditore deve essere spedito allegato allo strumento difettoso. Senza certificato di garanzia non si accettano reclami per la mancata concessione della garanzia secondo quanto sopra specificato.

CERTIFICATO DI GARANZIA 24 MESI

Data di acquisto

Numero di serie

Rivenditore

Difetto

Mittente

Data

Firma

Prodotto da:
F.BOSCH Gmgh &Co. KG
Postfach 5 – D-72042 Bisingen – Germany

Mandatario EU
F.BOSCH Gmgh &Co. KG
Postfach 5 – D-72042 Bisingen – Germany

Distribuito da
INTERMED S.r.l.
Via della Pace, 21 – 20098 S. Giuliano Milanese (MI)