

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

Sedie da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio, schienale reclinabile e braccioli e pedane estraibili. Imbottiture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort dell'utente. Ruote piroettanti in plastica con coperture in gomma dotate di freno.

Il modello AB-91 è corredato di poggia-testa regolabile in profondità ed altezza.

MATERIALI COMPONENTI

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta e schienale	Poliuretano
Poggia-braccia	Materiale plastico
Ruote	Plastica con coperture in gomma
Pedane poggia-piedi	Alluminio

DATI TECNICI

Dimensione seduta	42 x 42 cm
Dimensione schienale	53 x 37 cm
Dimensioni foro	16 x 32 cm
Distanza tra i braccioli	45 cm
Lunghezza braccioli	25 cm
Diametro ruote	10 cm
Spessore ruote	3 cm
Altezza seduta dal suolo	55 cm
Peso	14 kg per il modello AB-90 15 kg per il modello AB-91

Portata **kg 120**

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto fissaggio di seduta, braccioli e pedane. Controllare lo stato delle coperture in gomma delle ruote ed il funzionamento dei freni di stazionamento. Assicurarsi del corretto fissaggio dello schienale e delle regolazioni in altezza e profondità del poggiatesta. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.

MODALITA' DI MONTAGGIO

Applicare la seduta alla struttura tramite appositi supporti in plastica fissando con le quattro viti con manopola in dotazione. Sistemare i braccioli assicurandoli con le clip di bloccaggio. Montare le pedane ed inserire la vaschetta. Fissare, infine, il poggiatesta e procedere alle regolazioni in altezza e profondità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

CONSERVAZIONE SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti consumabili.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO CON RUOTE LINEA MODERN

- CON SCHIENALE RECLINABILE
AB-90**
- CON SCHIENALE RECLINABILE
E POGGIA-TESTA
AB-91**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it