

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEMA TECNICA</p> <p>BORSA ACQUA CALDA CON RIVESTIMENTO</p>	<p>Rev 04</p> <p>Gennaio 2009</p>
---	---	---

Codice	Capacità
CN 100.650	ml 2000

Indicazioni

Terapia del caldo. Disturbi alla circolazione sanguigna, ipertono muscolare, sciatica, lombosciatalgia, mal di schiena, dolori mestruali, malattie reumatiche.

Descrizione

Borsa per acqua calda bilamellata in gomma naturale con tappo di chiusura ermetica a vite provvista di una fodera in tessuto morbido.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura tra +15°C e +50°. Non utilizzare su cute lesa. Contattare sempre il medico curante prima dell'uso.

Pulizia e manutenzione

Prima di utilizzare il dispositivo la prima volta risciacquare l'interno della borsa con acqua tiepida. La superficie esterna può essere pulita quando necessario con acqua tiepida e detergente neutro non aggressivo. Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di avvitare il tappo e riporlo. In caso di inutilizzo prolungato prima di riavvitare il tappo lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa. Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.

Lavare il rivestimento a max. 30° - Non stirare

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia: 12 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE