

**CORSETTO LOMBARE
CON PELOTA POSTERIORE**

Misura	Codice	Circonferenza vita
S	OT-002S	56-71 cm
M	OT-002M	69-84 cm
L	OT-002L	81-96 cm
XL	OT-002XL	94-109 cm
XXL	OT-002XXL	107-122 cm

**Indicazioni**

- Lombalgie.
- Lombosciatalgie
- Discopatie lombari.
- Traumi lievi.
- Trattamento in fase post-operatoria.

Descrizione

- Struttura in materiale elastico con chiusura anteriore a velcro.
- Fascia lombare con quattro stecche flessibili in metallo non estraibili e pelota imbottita e sagomata.
- Tiranti di stabilizzazione con chiusura anteriore a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli adattamenti necessari nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del corsetto devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del corsetto e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del corsetto.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del corsetto su altri pazienti.

**CORSETTO LOMBARE
CON PELOTA POSTERIORE****Materiali componenti**

Struttura	Poliestere
Fascia lombare	Poliestere
Tiranti	Poliestere
Chiusure	Nylon
Fibbie	Poliossimetilene
Pelota	Eva con fodera in poliester

Modalità di lavaggio**Lavaggio parti in tessuto**

Rimuovere la pelota e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore**INTERMED srl****Codice CND****Y060308****N. Repertorio**

OT-002S	988078/R
OT-002M	988082/R
OT-002L	988083/R
OT-002XL	988084/R
OT-002XXL	988085/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE