

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

AQ-60	AQ61
	
	
Tavolino ad altezza regolabile	Tavolino a pistone ad altezza regolabile

AQ-60 Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza. Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano 40 x 60 cm
Regolazione in altezza da 72 a 115 cm

AQ-61 Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza a pistone. Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano 38 x 76 cm
Regolazione in altezza da 72 a 115 cm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- AQ-60
1. Fissare i supporti con ruote alla struttura metallica avendo cura di posizionare le ruote con sistema bloccante in prossimità dell'asta verticale.
 2. Inserire il supporto per il piano in legno nell'asta verticale rimuovendo la copertura in plastica posta a protezione della parte zigrinata del cilindro metallico.
 3. Sistemare il piano in legno.
 4. Procedere alle regolazioni in altezza ed inclinazione.

- AQ-61
1. **Non rimuovere la vite a stella posta all'interno del bordo in plastica nera nella parte superiore dell'asta di supporto verticale.**
 2. Capovolgere il piano in legno e fissare l'asta di supporto verticale utilizzando le due viti corte.
 3. Sistemare la leva in plastica nera all'estremità superiore del supporto verticale fissandola alla parte metallica sottostante il piano tramite vite con bullone.
 4. Assicurare le ruote alla base avendo cura di posizionare quelle con sistema bloccante in prossimità dei fori per il posizionamento dell'asta di supporto verticale.
 5. Fissare l'asta di supporto verticale alla base utilizzando le due viti lunghe con spessore cilindrico e la piastra con due fori.
 6. Solo a questo punto rimuovere la vite a stella situata nel bordo in plastica nera dell'asta di supporto verticale.
 7. Procedere alla regolazione in altezza.

PRECAUZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Verificare sempre il corretto funzionamento del sistema di bloccaggio delle ruote e l'adeguato serraggio dei meccanismi di regolazione in altezza ed inclinazione.

PULIZIA

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare, se del caso, con normali sostanze a base alcolica.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

24 mesi per difetti di fabbricazione.



ISTRUZIONI PER L'USO

**TAVOLINO AD ALTEZZA
REGOLABILE
AQ-60**

**TAVOLINO A PISTONE
AD ALTEZZA REGOLABILE
AQ-61**



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it