

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361</p>	<p><b>SCHEMA TECNICA</b></p> <p><b>Rapid Frost</b></p> <p><b>Ghiaccio Istantaneo busta PE</b></p>	<p><b>Rev 02</b> <b>Maggio 2010</b></p>
---	---	---

<b>Codice</b>	FROST001
<b>Confezione</b>	1 pezzo
<b>CND</b>	M9001
<b>Repertorio</b>	163815

**Descrizione**

Busta di ghiaccio istantaneo realizzata in politene stampato. La bolla di liquido, coperta da brevetto, contenuta all'interno della busta, è realizzata in materiale speciale tale da garantire un'assoluta resistenza e tenuta durante il trasporto, al tempo stesso, tale da consentire l'immediata rottura tramite una leggera pressione esercitata con le dita. Tale caratteristica previene il pericolo di danneggiamento delle termosaldature della busta se la medesima viene sottoposta a forti colpi.

**Indicazioni**

Impiego in tutti i casi nei quali è consigliata la terapia del freddo.

**Istruzioni per l'uso**

Premere all'altezza delle frecce con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Agitare la busta per miscelare il contenuto. Posizionare sulla parte interessata.

**Avvertenze**

Prodotto monouso esclusivamente per uso esterno. Non rompere il sacchetto per non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia e, se ingerito, è nocivo. In caso di ingestione ricorrere immediatamente all'intervento del medico.

**Contenuto**

Miscela di Sali azotati e acqua

**Scadenza**

5 anni dalla data di produzione negli imballaggi originali.

**Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili.

**Produttore:** Dispotech S.p.A. Chiavenna per Intermed S.r.l.

Formula rispondente al Reg. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. CE 552/2009

Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE (CE 0546)