

VELLO ANTIDECUBITO SINTETICO

CO-100.900
cm 50 x 70

CO-100.901
cm 70 x 100

Lotto 201002



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

VELLO ANTIDECUBITO SINTETICO

CO-100.900
cm 50 x 70

CO-100.901
cm 70 x 100

Lotto 201002



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Prevenzione del decubito allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

Come usare il dispositivo

Stendere il vello sul letto o sulla carrozzina in modo che rimanga perfettamente disteso.

Avvertenze

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Non adagiare il paziente a contatto del vello a pelle nuda se la zona interessata presenta già ulcere da pressione. Può provocare allergie in soggetti predisposti.

Se si sospetta il rischio di allergie, evitare il contatto diretto con la pelle interponendo un lenzuolo tra l'epidermide ed il vello.

Evitare il contatto diretto con le vie respiratorie.

Non esporre a fiamme libere.

Composizione

Vello e strato tessuto: 100% poliestere

Legatura: 100% poliestere

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavabile a mano o in lavatrice alla temperatura massima di 60°C.

Si può candeggiare.

Si può centrifugare.

Stirare solo sul lato della legatura con ferro a temperatura moderata con passaggi veloci e senza sosta.

Indicazioni

Ausilio per la prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi post-operatori e per pazienti lungodegenti.

Come usare il dispositivo

Stendere il vello sul letto o sulla carrozzina in modo che rimanga perfettamente disteso.

Avvertenze

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Non adagiare il paziente a contatto del vello a pelle nuda se la zona interessata presenta già ulcere da pressione. Può provocare allergie in soggetti predisposti.

Se si sospetta il rischio di allergie, evitare il contatto diretto con la pelle interponendo un lenzuolo tra l'epidermide ed il vello.

Evitare il contatto diretto con le vie respiratorie.

Non esporre a fiamme libere.

Composizione

Vello e strato tessuto: 100% poliestere

Legatura: 100% poliestere

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavabile a mano o in lavatrice alla temperatura massima di 60°C.

Si può candeggiare.

Si può centrifugare.

Stirare solo sul lato della legatura con ferro a temperatura moderata con passaggi veloci e senza sosta.