

**CAVIGLIERA BIVALVA  
CON INSERTI IMBOTTITI**

Misura	Codice
Unica	<b>CV-001</b>

**Indicazioni**

- Traumi distorsivi.
- Recupero funzionale in fase post-operatoria o post-traumatica.
- Instabilità legamentosa cronica.

**Descrizione**

- Struttura bivalva anatomica con fascia di regolazione per tallone a velcro.
- Doppia cinghia di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro.
- Inserti imbottiti laterali asportabili.

**Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della cavigliera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della cavigliera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della cavigliera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della cavigliera su altri pazienti.

**CAVIGLIERA BIVALVA  
CON INSERTI IMBOTTITI****Materiali componenti**

Struttura	Polipropilene e poliossimetilene
Inserti	Poliestere
Imbottiture inserti	Poliuretano
Cinghie di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon
Fascia regolazione tallone	Poliestere

**Dati tecnici**

Altezza valva	<b>255 mm</b>
Larghezza valva	<b>85 mm</b>
Altezza imbottitura	<b>250 mm</b>
Larghezza imbottitura	<b>95 mm</b>
Lunghezza cinghie	<b>460 mm</b>
Lunghezza fascia reg. tallone	<b>230 mm</b>

**Modalità di lavaggio****Lavaggio parti in tessuto**

Rimuovere gli inserti, la fascia di regolazione del tallone e le cinghie di stabilizzazione e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Lavaggio parti rigide**

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore** **INTERMED srl**

**Codice CND** **Y061206**  
**N. Repertorio** **946694/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE