

Avvertenza

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. In caso di anomalie, contattare il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Descrizione

Deambulatori pieghevoli ad un pulsante, variamente assemblati, con struttura in alluminio anodizzato e barra stabilizzatrice in acciaio (doppia barra nel caso del modello AD-46). Possibilità di regolazione in altezza ad otto differenti livelli.

Materiali componenti

Struttura	Alluminio anodizzato
Barra stabilizzatrice	Acciaio
Impugnatura	Poliuretano
Puntali e ruote	Gomma antiscivolo

Dati tecnici

Area di appoggio

Per tutti i modelli

AD-43	58 x 46 cm
AD-45	63 x 46 cm
AD-46	55 x 48 x 63 x 48 cm

Diametro impugnatura

Per tutti i modelli

4 cm

Peso

AD-40	2.5 kg
AD-41	2.6 kg
AD-42	2.8 kg
AD-43 AD-45	3.1 kg
AD-44 AD-46	2.7 kg

Regolazione in altezza

AD-40	81 x 101 cm
AD-41	82 x 102 cm
AD-42 AD-44 AD-45	84 x 104 cm
AD-43	85 x 105 cm
AD-46	80 x 100 cm

Portata

Per tutti i modelli	120 kg
---------------------	---------------

Modalità d'impiego

Aprire le due sezioni laterali del telaio fino allo scatto della spina di bloccaggio posizionata al centro della barra orizzontale superiore.

Regolare all'altezza desiderata esercitando una leggera pressione sulle spine di bloccaggio presenti in ogni gamba del deambulatore. L'altezza ottimale si raggiunge allorché, in posizione eretta e con il braccio disteso lungo il fianco, il polso dell'utilizzatore si trova in corrispondenza dell'impugnatura. Ulteriore conferma della corretta regolazione si avrà quando, afferrata l'impugnatura, il braccio si presenterà con un'angolazione di circa 20-30 gradi.

Richiudere il dispositivo premendo la guaina di colore grigio posta al centro della barra orizzontale superiore.

Precauzioni

Verificare sempre, prima dell'utilizzo, la stabilità del dispositivo ed il corretto posizionamento delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. Usare con estrema cautela in prossimità di superfici bagnate, scivolose, sconnesse o inclinate.

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Manutenzione

Controllare periodicamente la tenuta delle spine di bloccaggio e, a seconda dei modelli, la stabilità delle gambe dotate di ruote. Verificare, altresì, lo stato di conservazione dei puntali in gomma. In caso di eccessiva usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.
La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

Codici nomenclatore

AD-40 AD-46

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

AD-41 AD-42 AD-44

12.06.06.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

AD-43 AD-45

12.06.09.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

ISTRUZIONI PER L'USO

VERIFICARE IL CODICE CORRISPONDENTE AL DISPOSITIVO ACQUISTATO FACENDO RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA DI PRODOTTO

- ☐ **AD-40** Deambulatore pieghevole
- ☐ **AD-41** Deambulatore pieghevole con 2 ruote fisse
- ☐ **AD-42** Deambulatore pieghevole con 2 ruote piroettanti
- ☐ **AD-43** Deambulatore pieghevole con 4 ruote piroettanti
- ☐ **AD-44** Deambulatore pieghevole con 2 ruote fisse e 2 gambe con sistema autobloccante
- ☐ **AD-45** Deambulatore pieghevole con 2 ruote piroettanti e 2 ruote con sistema autobloccante
- ☐ **AD-46** Deambulatore pieghevole a due barre



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

Made in China
Revisione 00 - Luglio 2009