



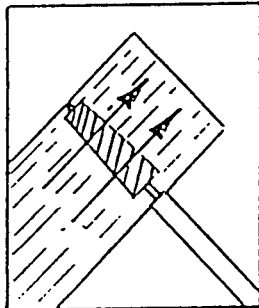

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI) - ITALY  
Tel. 199 400 401 - Fax 199 400 403  
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

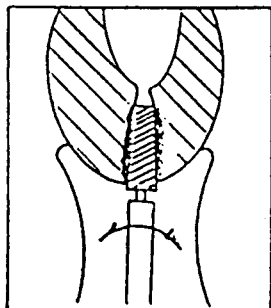

## ENDOBRUSH

### Descrizione:

Spazzolino con setole in nylon trattenute da un avvolgimento in metallo, fissato su stelo in plastica.

### Indicazioni:

Per effettuare un Pap-test adeguato, il prelievo deve contenere cellule eso cervicali ed endo cervicali.

Lo spazzolino e' indicato per prelevare cellule endo cervicali (cellule del canale cervicale uterino).

E' indicato anche in presenza di canale cervicale stenotico.

Da utilizzare, abbinato alla spatola, per effettuare il Pap-Test.

### Modalita' d'uso:

- introdurre lentamente lo spazzolino nel canale cervicale;
- effettuare una rotazione completa dello stelo;
- estrarre lo spazzolino;
- strisciare il materiale raccolto sul vetrino portaoggetto.



# GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI) - ITALY  
Tel. 199 400 401 - Fax 199 400 403  
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com