

REF 612PE	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
SUPPORTO PELVICO PER CINTURA CONTENIMENTO carrozzina(cod.612)			
ISTRUZIONI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fissare i galloni della pancera cod.612 allo schienale della carrozzina assieme al “ supporto pelvico” 2. Fare passare il supporto pelvico cod.612PE tra lo schienale e la seduta. 3. Fare sedere il paziente e assicurare con il bottone (cod.690M) il supporto pelvico assieme alla pancera. 4. Regolare la tensione del supporto pelvico tramite gli occhielli (dietro lo schienale). 			
		COLORE: ECRU’	
		MISURE: UNICA	
		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI NON STRIZZARE NON CENTRIFUGARE ASCIUGARE LONTANO DA FONTI CALORE.	
INDICAZIONI: INDICATA PER PAZIENTI COSTRETTI ALLA CARROZZELLA O COMODA PER EVITARNE LA CADUTA ACCIDENTALE.		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
COMPOSIZIONE: MTP: VELLUTINO POLLIAMIDE 100%, INTERNO POLIURETANO BASE ETERE 100%. 10% GALLONE: 100% COTONE 100%,OCCHIELLI OTT/NK.		CONFEZIONE: IN SACCHETTO DI PLASTICA.	
AVVERTENZE: DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON IL NS. COD.612 (CINTURA CONTENIMENTO PER CARROZZINA). DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO. <u>DA USARE DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA.</u>		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO..	
NECESSARI:  bottoni 690M+chiave 691M			