


Albo Land srl

Via Mastroianni,9
40013 Castel Maggiore BO (Italy)
Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877
P.IVA: 01778301208
Capitale Sociale €12000 I.V.
www.alboland.com info@alboland.com
R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

ALBO *Land* TM
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF 680	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
TIRANTE PELVICO IMBOTTITO PER CAROZZELLA.			
MISURE: UNICA		COLORE: BLU	
INDICAZIONI: INDICATO PER I PAZIENTI COSTRETTI SU CAROZZELLA O POLTRONA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO IN AVANTI.		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
COMPOSIZIONE: MTP: VELLUTINO POLLIAMIDE 100%, INTERNO POLIURETANO BASE ETERE 100%. GALLONE: COTONE 100% . FIBBIA TRIDENTE DI PLASTICA ACETILICA RESISTENZA 100kg.(scheda tecnica a parte)		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
ISTRUZIONI: <ol style="list-style-type: none">1. APPOGGIANDO IL CENTRO DEL GALLONE SULLO SCHIENALE, PORTARE LE 2 ESTREMITA' E LE IMBOTTITURE SULLA SEDUTA,2. FARE SEDERE IL PAZIENTE3. RIPRENDERE I GALLONI TRA LE GAMBE DEL PAZIENTE E FISSARLI DIETRO ALLO SCHIENALE REGOLANDONE LA TENSIONE TRAMITE LE FIBBIE IN PLASTICA.		CONFEZIONE: SACCHETTO.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI USO.		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
680 N° progressivo: 1367892 GMDN: 13356 CND: Y122406			