

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



## PREDELLINO PER VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA

### AB-70

Lotto di produzione **0901**



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



## PREDELLINO PER VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA

### AB-70

Lotto di produzione **0901**



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

### **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Il dispositivo viene fornito con piano d'appoggio e supporti per gambe già assemblati.

### **DESCRIZIONE**

Predellino per vasca regolabile in altezza a tre diversi livelli.  
Puntali in gomma antiscivolo.

### **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura: alluminio anodizzato

Piano d'appoggio: polietilene

Puntali: gomma antiscivolo

### **DATI TECNICI**

Dimensioni del piano d'appoggio: **41 x 23 cm**

Regolazione in altezza: **20-25,5 cm**

Peso: **1,3 kg**

Portata massima: **120 kg**

### **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo. Controllare, all'atto della regolazione in altezza, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. Impiegare in piano evitando superfici bagnate.

### **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.

Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.

Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma.

### **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

### **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Il dispositivo viene fornito con piano d'appoggio e supporti per gambe già assemblati.

### **DESCRIZIONE**

Predellino per vasca regolabile in altezza a tre diversi livelli.  
Puntali in gomma antiscivolo.

### **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura: alluminio anodizzato

Piano d'appoggio: polietilene

Puntali: gomma antiscivolo

### **DATI TECNICI**

Dimensioni del piano d'appoggio: **41 x 23 cm**

Regolazione in altezza: **20-25,5 cm**

Peso: **1,3 kg**

Portata massima: **120 kg**

### **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo. Verificare, all'atto della regolazione in altezza, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. Impiegare in piano evitando superfici bagnate.

### **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.

Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.

Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma.

### **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.