



## SICUREZZA

- Non utilizzare come sedia a rotelle o sedia di trasporto.
- Non sostare mai sul deambulatore per nessun motivo.
- Utilizzare il sedile esclusivamente per sedersi. Non spingersi mai con i piedi.
- **NON** sollevare mai il rollator, durante l'uso, afferrandolo per la maniglia di chiusura
- Non salire o scendere le scale o utilizzare scale mobili.
- Entrambi i freni devono essere in posizione di parcheggio quando il deambulatore viene utilizzato come sedia.
- Il deambulatore deve essere completamente aperto quando viene utilizzato come ausilio per camminare. N.B. Il deambulatore deve essere utilizzato esclusivamente come ausilio per camminare.
- Prestare la massima attenzione alle superfici inclinate.
- Prestare la massima attenzione quando si trasportano carichi pesanti nel cestello. I carichi devono essere trasportati esclusivamente nel cestello o sul ripiano. Carico max sul ripiano: 5 kg.

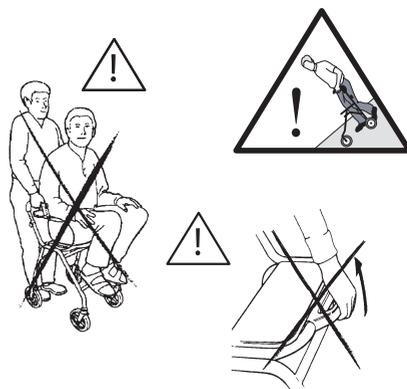


## ACCESSORI

- A) Montaggio del cestello.
- B) Fissare il ripiano con i tappi di plastica.
- C) Fermo

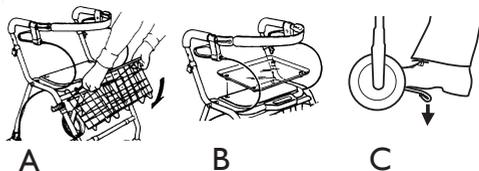


## RIPIEGAMENTO DEL SEDILE

Il sedile può essere ripiegato per ottenere maggiore spazio per camminare e migliorare l'accessibilità.

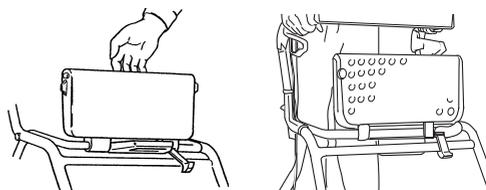

## RIPIEGAMENTO

- A) **DOLOMITE LEGACY**  
Tirare l'impugnatura verso l'alto.
- B) **DOLOMITE OPAL 2000, MAXI**
  1. Sganciare il fermo di sicurezza.
  2. Sollevare l'impugnatura per ripiegare il deambulatore.
- C) Quando è ripiegato, il deambulatore è più facile da sollevare e trasportare.

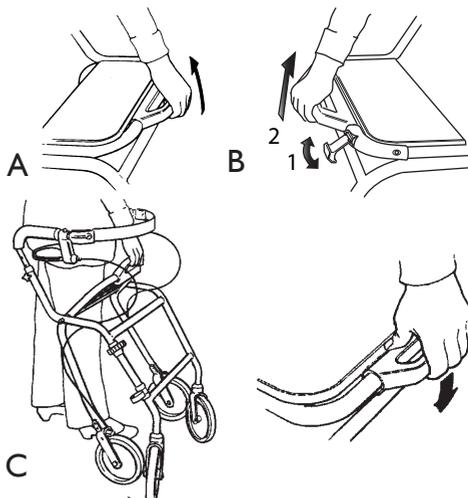

## POSIZIONE PER CAMMINARE

Per riportare il deambulatore in posizione normale, spingere con forza il sedile verso il basso finché non si sente un clic.

## FRENI

Per inserire i freni, tirare entrambe le impugnature dei freni verso l'alto.

## FRENO DI STAZIONAMENTO

Premere a fondo per inserire il freno di stazionamento (se il freno è posizionato correttamente, si deve sentire un clic). N.B. Portare sempre entrambi i freni in posizione di parcheggio. Tirare verso l'alto per disinserire il freno.

Entrambi i freni devono essere in posizione di parcheggio quando il deambulatore viene utilizzato come sedia.

## REGOLAZIONE DEI FRENI

Per ottenere l'effetto frenante desiderato, regolare il cavo dei freni.

Utilizzare una chiave da 1x8 mm oppure da 1x10 mm (non in dotazione).

## IMPUGNATURE

Per regolare le impugnature ad un'altezza adeguata, sostare dietro il deambulatore con le spalle diritte. Le impugnature devono trovarsi all'altezza del polso dell'utente. Un terapeuta può suggerire un'altezza differente in base alle esigenze particolari dell'utente.

### DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000


#### Regolazione delle impugnature con fori:

Allentare completamente la manopola e rimuovere la vite. Regolare l'impugnatura ad un'altezza adeguata. Fissare la vite nel foro esagonale e bloccare saldamente la manopola.

### DOLOMITE MAXI

#### Regolazione libera:

Allentare il fermo, regolare l'impugnatura ad un'altezza adeguata e serrare saldamente il fermo.

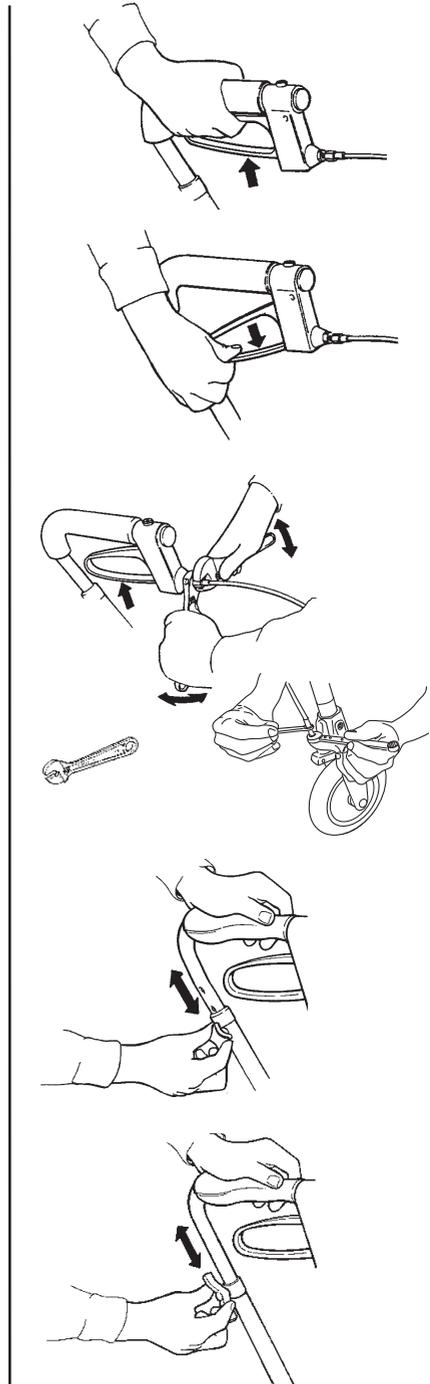

## MANUTENZIONE - SICUREZZA

Per ottenere le massime prestazioni e la massima sicurezza, procedere regolarmente come segue: Pulire il deambulatore con un detergente senza solventi. Tenere pulite le ruote.

- **Accertarsi che le viti ed i fermi siano saldamente serrati.**
- **In caso di guasto, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore. Non utilizzare mai un deambulatore difettoso.** Non tentare di ripararlo autonomamente!

**N.B. Il deambulatore deve essere utilizzato esclusivamente come ausilio per camminare!**

**Peso max dell'utente: DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000 125 kg. DOLOMITE MAXI 160 kg.**


**DOLOMITE HCP/DOLOMITE** non si assume alcuna responsabilità per eventuali adattamenti, riparazioni errate ecc. non espressamente autorizzati.

## ISTRUZIONI SU ROTTAMAZIONE DEL PRODOTTO ED IMBALLAGGIO:

Al termine della vita utile, il prodotto, gli accessori ed il materiale di imballaggio devono essere smaltiti correttamente. I singoli componenti possono essere separati e smaltiti in base ai rispettivi materiali.

L'etichetta su **DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000** e **MAXI** riporta informazioni tecniche importanti.

- 1: Codice
- 2: Denominazione del prodotto
- 3: Numero di serie I
- 4: Data di produzione
- 5: Peso max utente
- 6: NB - Vedere le istruzioni per l'uso
- 7: Deambulatore per l'uso in interni e all'aperto
- 8: Larghezza max del deambulatore
- 9: Produttore

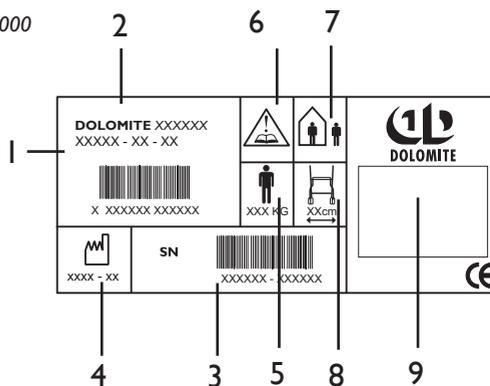


INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SVEZIA  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

[www.dolomite.biz](http://www.dolomite.biz)

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)  
TEL (39) 0445 38 00 59. FAX (39) 0445 38 00 34



# **DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000, MAXI**

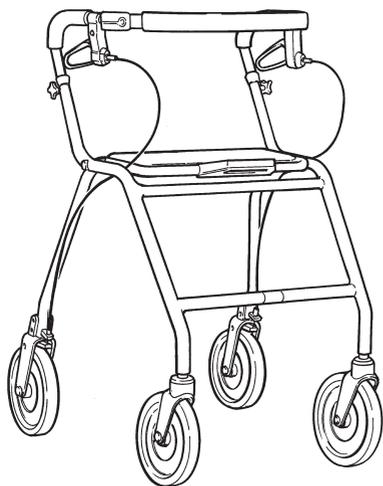

  
*Non utilizzare come sedia a  
rotelle o sedia di trasporto.*



## **ISTRUZIONI PER L'USO**

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.  
Il deambulatore è idoneo per l'uso sia in interni che in esterni.

\* TESTATO DAL CENTRO DI RICERCA INDUSTRIALE (SINTEF), NORVEGIA



**IT** ISTRUZIONI PER L'USO