

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

orthoself® ■ identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione.

Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

medicalortho® ■ identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

Grazie per aver scelto la qualità RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN s.r.l.
via Monte Cervino, 50
20043 Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com
info@roplusten.com

RO+TEN

Shouldfix open

ART. PR2-8410
Immobilizzatore per braccio e spalla

Blocca l'articolazione assicurando leggerezza e comfort.



medicalortho®



LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO LE SEGUENTI ISTRUZIONI

È un dispositivo medico, leggero e confortevole, che assicura un'ottima immobilizzazione dell'articolazione della spalla mantenendo l'arto interessato in una posizione corretta ed efficace per tutto il periodo di convalescenza.

La struttura particolarmente ridotta garantisce un'ottima capacità di bloccaggio articolare unita ad una leggerezza e traspirabilità senza eguali. Di facile applicazione, assume la sua posizione funzionale in pochissimi secondi. Il tessuto in accoppiato traspirante, lavabile e resistente, rende più confortevole l'utilizzo.

RO+TEN





CARATTERISTICHE

Struttura in morbido accoppiato con lato esterno in nylon garzato per l'attacco a velcro.

Tirante giro spalla con chiusura a fibbia a scatto.

1. Girare la fascia (A) attorno alla vita e chiuderla a velcro in modo che risulti ben tesa.
2. Far coincidere il manicotto (B) cucito alla fascia col braccio interessato e bloccare quest'ultimo fissando l'apposita chiusura a velcro.
3. Fissare alla fascia (A) la tasca di sostegno dell'avambraccio (C), dopo avervi inserito l'arto.
4. Fissare posteriormente a velcro la cintura girospalla (D) sulla fascia (A). Far passare sulla spalla opposta a quella interessata la cintura (D) e bloccarla sulla tasca con la fibbia a scatto (E).
5. Tendere opportunamente la cintura girospalla (D). Assicurarsi che il manicotto di protezione del collo (F) sia posizionato correttamente.
6. Bloccare con il cinturino a velcro (G) la parte superiore della tasca (C) alla fascia (A).

INDICAZIONI

Fratture composte dell'omero.

Lussazioni gleno-omerali.

Distorsioni della spalla.

Trattamento post-operatorio delle fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omeroale.

Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

AVVERTENZE


L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

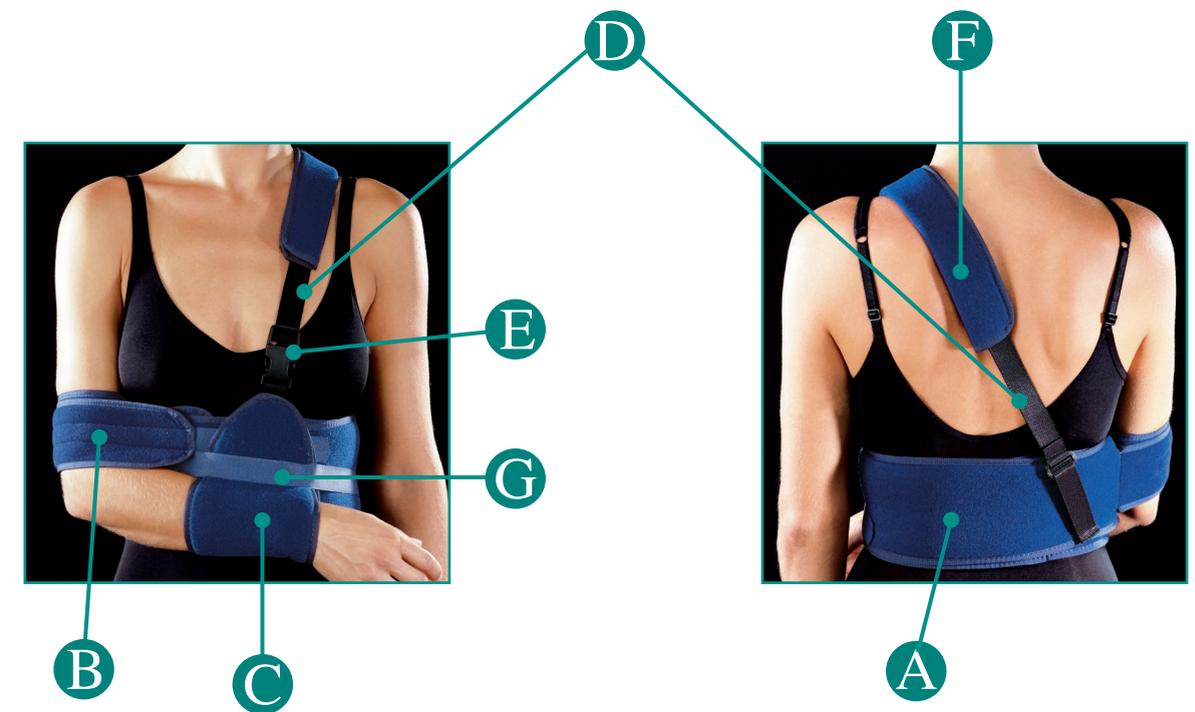

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Per la sostituzione delle componenti usurate rivolgersi al proprio tecnico ortopedico.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.