

## **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

## **DESCRIZIONE**

Sedia per doccia pieghevole regolabile in altezza a tre differenti livelli. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Schienale pieghevole per un corretto supporto dorsale. Puntali in gomma antiscivolo.

## **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura: alluminio anodizzato

Seduta: polietilene

Puntali: gomma antiscivolo

## **DATI TECNICI**

Dimensioni della seduta: **50 x 30 cm**

Regolazione in altezza: **42-46 cm**

Peso: **2.5 kg**

Portata massima: **120 kg**

## **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo.

Controllare, inoltre, all'atto della regolazione in altezza, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri.

Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.

Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma.

## **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**



1. Capovolgere la seduta del dispositivo.
2. Inserire le gambe contrassegnate da numeri o lettere nei supporti recanti medesimi numeri o lettere.
3. Procedere alla regolazione in altezza avendo cura di posizionare tutte le spine di bloccaggio al medesimo livello.
4. Sollevare lo schienale.
5. Assicurare la seduta alle gambe tramite apposito fermo.

## **MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## SEDIA PER DOCCIA PIEGHEVOLE

**AB-22**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)