

LACCIO EMOSTATICO «JETPULL 2»
COD. 25722

Il laccio emostatico “Jetpull 2” consiste in una larga banda elastica con un gancio maschio ad un terminale che si attacca ad una fibbia femmina di sicurezza di plastica. La banda può essere stretta tirando il terminale lungo. Il gancio non può essere staccato senza prima allentare la tensione della banda elastica premendo il bottone. Dopo che la tensione è stata rilasciata, il gancio può essere staccato scorrendo indietro sullo stesso bottone e quindi premendo nuovamente per sganciare. La larghezza della banda elastica previene qualsiasi tipo di taglio della pelle. Usato in condizioni normali non causa problemi di nessun tipo.

Materiale della banda elastica: 64,7 % poliammide (polimero derivato da composti contenenti ammina e gruppi carbossili) utilizzato nella realizzazione di varie fibre sintetiche, e 35,3 % caucciù, un tipo di gomma.

I lacci emostatici devono essere disinfettati secondo le istruzioni seguenti fornite dal Chlorine Institute di Washington DC e dalla CLOROX Company.

Immergere il laccio emostatico in 1/4 di CLOROX Germicidal Bleach per 1 gallone d’acqua per 5-10 minuti, risciacquare con acqua ed asciugare.

E’ possibile sterilizzare i lacci emostatici anche in autoclave (121°C 20 min. 2 bar). Questa procedura viene raccomandata solo per lacci pericolosamente contaminati.