

Rampe Mobilex Alligator SR

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex.dk

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Avvisi per la sicurezza

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare le rampe, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare le rampe solo per l'uso consentito e solo se sono in perfetto stato. Non apportate modifiche alle rampe, se non esplicitamente autorizzate dal costruttore
- Se il prodotto presentasse un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- Le rampe possono essere caricate al massimo di 300 kg (portata massima)
- Le rampe devono essere usate solo su terreni stabili con piani d'appoggio paralleli
- Le rampe SR possono essere usate per superare i seguenti dislivelli (max.):
 - SR-180 35 cm**
 - SR-240 50 cm**
- Nel piegare o ripiegare delle rampe chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo

3. Descrizione

Descrizione del prodotto

Le rampe SR sono d'alluminio con una superficie antiscivolo ricoperta di silicato d'alluminio. Le rampe SR sono disponibili in 2 misure diverse.

Descrizione della funzione

Le rampe Mobilex sono ideate per aiutare persone in carrozzina a superare ostacoli con o senza l'aiuto di una persona accompagnatoria.

Fornitura


Le rampe Mobilex SR sono fornite in 1 cartone contenente:

- ✓ 1 rampa Mobilex SR
- ✓ questo manuale

Montaggio

Le rampe Mobilex SR sono fornite già assemblate e per l'uso dovranno essere solo dispiegate (vedi immagine sottostante)

Descrizione del funzionamento / dispiegamento

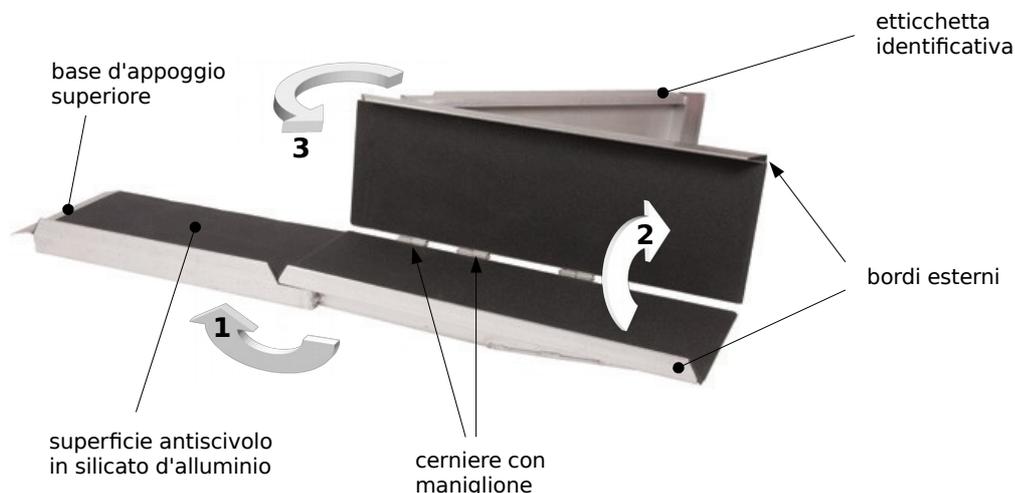

Dispiegate la rampe nel seguente ordine:

1. dispiegate di ca. 180° la parte sinistra della rampa (freccia 1)
2. aprite di ca. 90° (come un libro) l'altra parte della rampa (freccia 2)
3. dispiegate ora di ca. 180° anche il secondo segmento della parte destra della rampa (freccia 3) in modo che venga a trovarsi parallela alla parte sinistra. Ora la rampa è completamente aperta.

Appoggiate le due basi d'appoggio superiori sull'ostacolo e controllate che appoggi stabilmente ed in piano. Ora la rampa è pronta all'uso. Per chiudere la rampa ripetete i punti d.c.s. all'inverso.

Prego notate che:

- le rampe Mobilex SR sono dotate di un'etichetta identificativa(vedi immagine sopra)
- le basi d'appoggio definiscono la parte superiore della rampa e dovranno poggiare sull'ostacolo in maniera stabile ed orizzontale
- le rampe dovranno essere usate solo se completamente dispiegate ed aperte
- prima di ogni uso controllare sempre che le rampe siano perfettamente stabili ed orizzontali

Trasporto

Le rampe SC possono essere ripiegate e sono dotate di un comodo maniglione per il trasporto .

Accessori

Per le rampe Mobilex SR non sono disponibili ulteriori accessori.

4. Dati tecnici

Rampe SR	SR-180	SR-240
lunghezza	180 cm	240 cm
larghezza	80 cm	80 cm
corsia utile	72 cm	72 cm
altezza dei bordi laterali	6 cm (esterno)	6 cm (esterno)
dislivello max. superabile	12° / 35 cm	12° / 50 cm
peso	14,1 kg	18,5 kg
portata	300 kg	300 kg

Etichetta identificativa

l'etichetta si trova su uno dei bordi esterni

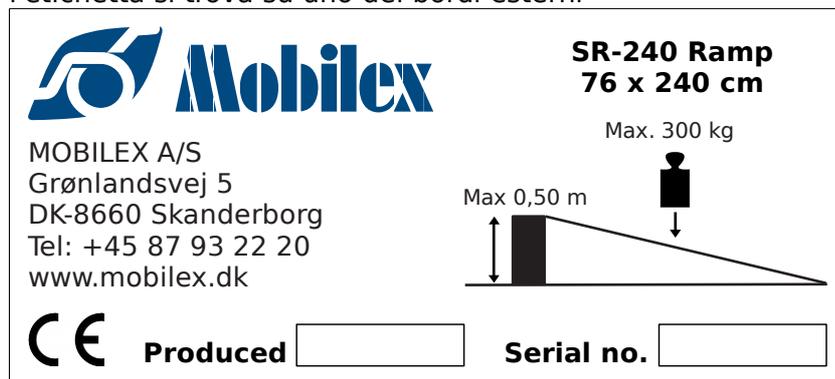


immagine dell'etichetta (esempio)

5. Pulizia e manutenzione

Leggera sporcizia e polvere possono essere rimosse con un panno umido. Una pulizia approfondita può essere effettuata con detergenti neutri usati per pulizia o disinfezione e con panni morbidi e non abrasivi. Controllate comunque attentamente anche le etichette e le indicazioni dei detergenti.

Le rampe Mobilex non necessitano di una particolare manutenzione ma nonostante la stabilità della costruzione e l'uso di materiali durevoli è consigliabile fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Smaltimento

Le rampe Mobilex non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle Oasi Ecologiche.

7. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto. La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

8. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che le

Rampe Mobilex Alligator SF

sono state progettate e costruite in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993**
appendice I concernente i dispositivi medici

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S
Skanderborg, li 10/09/2012

