




# GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI) - ITALY

Tel. 199 400 401 - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

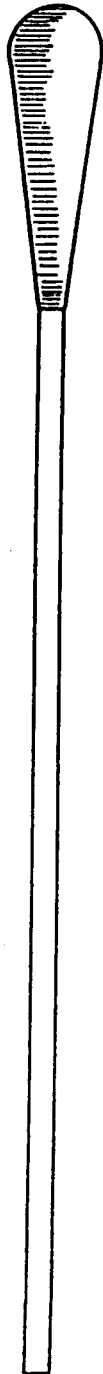

## STICK COTTON

### Descrizione:

Tampone in cotone, fissato su stelo in plastica.

### Composizione:

- Testa del tampone: cotone 100%  
Ø ~ 1 cm;
- Stelo: plastica;
- Lunghezza totale: 20 cm.

### Indicazioni:

Indicato per detergere, asciugare, applicare soluzioni su tessuti e mucose.

In ginecologia per:

- rimuovere muco cervicale;
- tamponare perdite ematiche in corso di piccoli interventi ambulatoriali;
- disinfettare cervice, vagina, vulva;
- test colposcopici: applicazione di acido acetico, soluzione di Lugol.

### Modalita' d'uso:

Per applicare soluzioni:

- immergere il tampone nel liquido;
- attendere alcuni istanti per favorire l'assorbimento;
- applicare sulla mucosa, con leggere e ripetute pressioni.



# GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI) - ITALY

Tel. 199 400 401 - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com