

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42
e successive modifiche

CODICI:

EM430	ROSA	INFANT (neonatale)
EM431	CELESTE	PEDIATRIC (pediatrico)
EM432	VIOLA	NECKLESS (senza collo)
EM433	BLU	SHORT (collo corto)
EM434	ARANCIO	REGULAR (Collo standard)
EM435	VERDE	TALL (Collo lungo)

Il collare cervicale da emergenza modello doppio EASYRED by Moretti viene utilizzato in casi di emergenza pre-ospedaliera. Permette una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale ed essendo formato da due pezzi assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale. È dotato di foro centrale per il controllo della trachea e per effettuare un'eventuale tracheotomia. Si appiattisce per ridurre lo spazio di stoccaggio.

IL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE APPLICATO A CONTATTO DIRETTO DELLA CUTE LESA. SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DA PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO.

PRECAUZIONI: non utilizzare collari di misure inadeguate

COMPOSIZIONE: Il collare è realizzato in polietilene RADIOTRASPARENTE con imbottitura in E.V.A lavabile. Chiusura Velcro regolabile.

PULIZIA: lavabile in acqua tiepida massimo 30°. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc.

LATEX FREE - PRODOTTO NON STERILE - RADIOTRASPARENTE

Le diverse colorazioni del polietilene permettono una facile identificazione della misura

USO:

1^ FASE



Separare i due elementi. Prendere la parte frontale ed inserire gli spinotti

2^ FASE



Stabilizzare la testa del paziente. Accostare il collare al mento ed alla parte sternale. Tenerlo in posizione e avvolgerlo al collo

3^ FASE



Cingere il collo con la fascia e bloccarla con il velcro mantenendo sempre la posizione del collo

4^ FASE



Posizionare la parte posteriore dietro la testa in modo centrato e riunire le parti in velcro

5^ FASE



Serrare le parti in velcro per stabilizzare la posizione del collo del paziente



MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

MA EM43X 02 A_10/2013

COLLARE CERVICALE EMERGENZA DOPPIO

MANUALE D'ISTRUZIONE