

SKEMA[®]FORM

LETTINI PROFESSIONALI IN LEGNO A VALIGIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE.....	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI.....	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE.....	pag.4
6.1 Vista e descrizione delle parti M0732	pag.4
6.2 Vista e descrizione delle parti M0742-M0745	pag.4
6.3 Vista e descrizione delle parti M0743-M0746.....	pag.4
7. MONTAGGIO.....	pag.5
7.1 Montaggio M0732-M0742-M0743-M0745-M0746	pag.5
8. ACCESSORI DISPONIBILI.....	pag.5
9. PRIMA DI OGNI USO.....	pag.5
10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	pag.5
11. MODALITÀ D'USO.....	pag.5
12. MANUTENZIONE	pag.5
13. PULIZIA E DISINFEZIONE	pag.5
13.1 Pulizia.....	pag.5
13.2 Disinfezione	pag.5
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.6
14.1 Condizioni di smaltimento generali	pag.6
14.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/CEE	pag.6
15. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.6
15.1 Specifiche dei materiali di tutti i modelli.....	pag.6
15.2 Dimensioni e peso M0732	pag.6
15.3 Dimensioni e peso M0742	pag.6
15.4 Dimensioni e peso M0743.....	pag.6
15.5 Dimensioni e peso M0745.....	pag.6
15.6 Dimensioni e peso M0746.....	pag.7
16. GARANZIA.....	pag.7
17. RIPARAZIONI.....	pag.7
17.1 Riparazioni in garanzia.....	pag.7
17.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag.7
17.3 Prodotti non difettosi.....	pag.7
18. RICAMBI	pag.7
19. CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.7

CE Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24 / 02/ 97 n. 46
attuazione della direttiva CEE 93 / 42 e successive modifiche

1. CODICI

M0732	Letto legno pieghevole Polaris
M0742	Letto legno pieghevole regolabile Polaris
M0743	Letto legno pieghevole regolabile con alzatesta Polaris
M0745	Letto legno pieghevole regolabile Polaris - 70cm
M0746	Letto legno pieghevole regolabile con alzatesta Polaris - 70 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un letto da visita medica della linea SKEMA by Moretti.

I letti da visita medica Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il letto da visita medica. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente

3. DESTINAZIONE D'USO

I letti da visita medica Moretti sono destinati all'utilizzo nella diagnosi e nei trattamenti fisioterapici di breve durata.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia letti da visita elettrici è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

5. AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale

- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e comunque non superiore a 10 anni
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

6. DESCRIZIONE GENERALE


6.1 Vista delle parti M0732



6.2 Vista delle parti M0742-M0745



6.3 Vista delle parti M0743-M0746

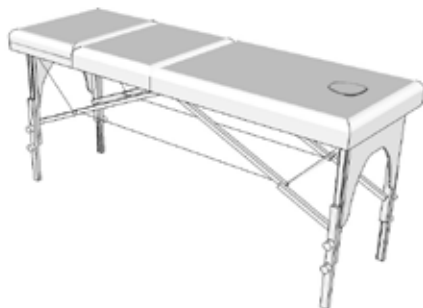

7. MONTAGGIO

7.1 Montaggio M0732-M0742-M0743-M0745-M0746



ATTENZIONE!

Eseguire queste operazioni con l'ausilio di un altro operatore, prestando molta attenzione per evitare lesioni fisiche e/o danni alle cose durante lo spostamento del letto

Tutti i lettini pieghevoli vengono forniti montati. Per i modelli regolabili, per la regolazione dell'altezza svitare le due manopole ed estrarre la gamba. Posizionare la gamba all'altezza preferita e stringere le manopole. Ripetere l'operazione sulle altre tre gambe assicurandosi che siano tutte alla stessa altezza

8. ACCESSORI DISPONIBILI

M0755: Borsa per il trasporto (eccetto per M0745-M0746)

M0747: Poggiabraccia + poggiatesta (eccetto per M0732)

M0748: Poggiatesta (eccetto per M0732)

M0749: Poggiabraccia (eccetto per M0732)

M0750: Braccioli laterali (eccetto per M0732-M0745-M0746)

9. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione ai perni e fermi di bloccaggio della testiera, delle articolazioni meccaniche in generale

10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Prima di effettuare qualsiasi regolazione sul letto assicurarsi che questo sia in posizione stabile sulle gambe
- Evitare il contatto con creme ed olii per massaggi, interporre sempre un lenzuolino tra il lettino ed il paziente

11. MODALITÀ D'USO PER I MODELLI M0743 - M0746

È possibile regolare l'inclinazione della testata del letto da 0° a 45°. Alzare lo schienale, portarlo all'altezza desiderata e trovare il punto di bloccaggio dei compassi metallici



ATTENZIONE!

Prima di posizionare un paziente sul letto verificare sempre il corretto bloccaggio in sicurezza della testata, ed assicurarsi che le manopole sulle gambe siano correttamente bloccate

12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea SKEMA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare, almeno una volta l'anno, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura portante del letto

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia: Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C.

13.2 Disinfezione: Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

14.1 Condizioni di smaltimento generali



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati

14.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/CEE:



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Specifiche dei materiali di tutti i modelli

Materiale struttura:	Legno di frassino americano, cassa in multistrato di pioppo
Imbottitura:	Poliuretano densità 25 Altezza 4 cm (M0745 - M0746) Altezza 3 cm (tutti gli altri modelli)
Rivestimento:	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 11M
Verniciatura:	Prodotti all'acqua

15.2 Dimensioni e peso M0732

Dimensioni da aperto:	L: 1820 P: 550 H: 750 mm
Dimensioni da chiuso:	L: 910 P: 190 H: 550 mm
Peso letto:	14 Kg
Portata massima:	120 Kg

15.3 Dimensioni e peso M0742

Dimensioni da aperto:	L: 1820 (2100 c/poggiatesta) P: 550 (830 c/braccioli) H: 600÷800 mm
Dimensioni da chiuso:	L: 910 P: 200 H: 600 mm
Peso letto:	12 Kg
Portata massima:	120 Kg

15.4 Dimensioni e peso M0743

Dimensioni da aperto:	L: 1820 (2100 c/poggiatesta) P: 600 (830 c/braccioli) H: 600÷800 mm
Dimensioni da chiuso:	L: 910 P: 200 H: 600 mm
Peso letto:	14 Kg
Portata massima:	120 Kg

15.5 Dimensioni e peso M0745

Dimensioni da aperto:	L: 1820 (2100 c/poggiatesta) P: 700 H: 600÷800 mm
Dimensioni da chiuso:	L: 910 P: 200 H: 700 mm
Peso letto:	13 Kg
Portata massima:	120 Kg

15.6 Dimensioni e peso M0746

Dimensioni da aperto:	L: 1820 (2100 c/poggiatesta) P: 700 H: 600÷800 mm
Dimensioni da chiuso:	L: 910 P: 210 H: 700 mm
Peso letto:	16 Kg
Portata massima:	120 Kg

16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

17. RIPARAZIONI

17.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

17.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

17.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

18. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio

19. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com