

SKEMA®

SGABELLI

MANUALE ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE.....	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.4
5. AVVERTENZE GENERALI.....	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE.....	pag.4
6.1 Vista e descrizione delle parti	pag.4
7. MONTAGGIO.....	pag.4
7.1 Montaggio dello sgabello.....	pag.4
8. PRIMA DI OGNI USO.....	pag.5
9. MODALITÀ D'USO.....	pag.5
9.1 Per i modelli MI474A - MI474B - MI474BLU - MI474N - MI474V - MI477B MI477N - MI477V - MI478N - MI479A - MI479B - MI479BLU MI479N - MI479V - MI480N	pag.5
9.2 Per i modelli MI476B - MI476BLU - MI476N - MI476V	pag.5
10. MANUTENZIONE	pag.5
11. PULIZIA & DISINFEZIONE	pag.5
11.1 Pulizia	pag.5
11.1 Disinfezione.....	pag.5
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.5
12.1 Condizioni di smaltimento generali	pag.5
12.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/CEE.....	pag.5
13. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.6
14. GARANZIA.....	pag.8
15. RIPARAZIONI.....	pag.8
15.1 Riparazioni in garanzia	pag.8
15.2 Riparazione di un prodotto non coperto da garanzia	pag.8
15.3 Prodotti non difettosi.....	pag.8
16. RICAMBI.....	pag.9
17. CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.9

CE Dispositivo Medico di classe I

D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva
CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICI

MI474A	Sgabello pistone cromato - Ruote cromate - Seduta in acciaio
MI474B	Sgabello pistone cromato - Ruote cromate - Seduta imbottita bianca
MI474BLU	Sgabello pistone cromato - Ruote cromate - Seduta imbottita blu
MI474N	Sgabello pistone cromato - Ruote cromate - Seduta imbottita nera
MI474V	Sgabello pistone cromato - Ruote cromate - Seduta imbottita verde
MI476B	Sgabello a vite su ruote - Seduta imbottita bianca
MI476BLU	Sgabello a vite su ruote - Seduta imbottita blu
MI476N	Sgabello a vite su ruote - Seduta imbottita nera
MI476V	Sgabello a vite su ruote - Seduta imbottita verde
MI477B	Sgabello a pistone su ruote - Seduta imbottita bianca
MI477BLU	Sgabello a pistone su ruote - Seduta imbottita blu
MI477N	Sgabello a pistone su ruote - Seduta imbottita nera
MI477V	Sgabello a pistone su ruote - Seduta imbottita verde
MI478N	Sgabello a pistone su ruote - Seduta e schienale in PU nero
MI479A	Sgabello pistone cromato da 20 cm - Ruote cromate - Seduta in acciaio
MI479B	Sgabello pistone cromato da 20 cm - Ruote cromate - Seduta imbottita bianca
MI479BLU	Sgabello pistone cromato da 20 cm - Ruote cromate - Seduta imbottita blu
MI479N	Sgabello pistone cromato da 20 cm - Ruote cromate - Seduta imbottita nera
MI479V	Sgabello pistone cromato da 20 cm - Ruote cromate - Seduta imbottita verde
MI480N	Sgabello a pistone su ruote - Seduta a sella in PU nero

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto uno sgabello della linea SKEMA by Moretti. Gli sgabelli Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare lo sgabello. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sgabelli di supporto per attività medicali.

ATTENZIONE!

- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche



4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia sgabelli è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

5. AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale

- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

6. DESCRIZIONE GENERALE

6.1 Vista e descrizione delle parti

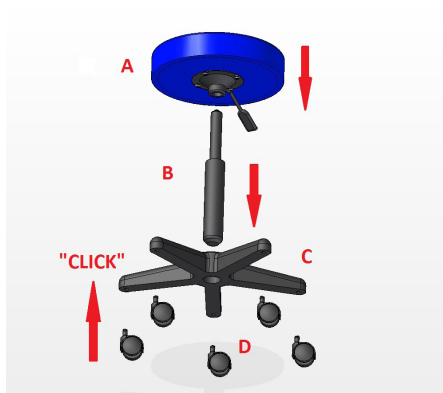


Fig.1

Elenco delle parti

- A- Seduta
- B- Pistone sollevamento
- C - Base a 5 razze
- D - Ruote piroettanti

7. MONTAGGIO

7.1 Montaggio dello sgabello

1. Aprire il cartone di imballo dello sgabello e verificare che il contenuto corrisponda al modello da voi richiesto e che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. In caso contrario

contattare immediatamente il vostro rivenditore.

N.B. - Per il montaggio di queste sgabelli non è necessario l'utilizzo di nessun attrezzo aggiuntivo. (Fig.1)

1. Inserire le ruote piroettanti nella base a 5 razze, fino ad avvertire un "click" di collegamento avvenuto;
2. Inserire il pistone nel foro centrale di alloggiamento della base;
3. Inserire la seduta sul pistone appena montato.

8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo

9. MODALITA' USO

9.1 Per i modelli MI474A - MI474B - MI474BLU - MI474N - MI474V - MI477B - MI477N - MI477V MI478N - MI479A - MI479B - MI479BLU - MI479N - MI479V - MI480N:

Essendo questi sgabelli dotati di pistone a gas con relativa maniglia di azionamento, posizionata sotto la seduta sollevare quest'ultima per abbassare o alzare lo sgabello. Rilasciarla per bloccare di nuovo il pistone.

9.2 Per i modelli MI476B - MI476BLU - MI476N - MI476V:

Essendo questi sgabelli dotati di pistone a vite senza maniglia di azionamento, ruotare la seduta in senso anti-orario per sollevare lo sgabello e in senso orario per abbassarlo.

10. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea SKEMA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno una volta l'anno, l'idoneità all'uso del vostro prodotto.

11. PULIZIA & DISINFEZIONE

11.1 Pulizia

Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore

11.2 Disinfezione

Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO



12.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati












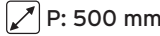
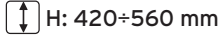


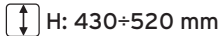


12.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/CEE:



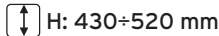



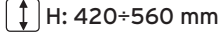


Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali,






oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato






13. CARATTERISTICHE TECNICHE




Dimensioni MI474A			
Tipo di seduta	Seduta Ø 29 cm - Acciaio inox		
Tipo di pistone	Pistone cromato a gas 140 mm		
Tipo di base con ruote	Base in alluminio Ø 50 cm con 5 ruote cromate		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		
Dimensioni MI474B MI474BLU - MI474N - MI474V			
Tipo di seduta	Seduta Ø 32 cm imbottita in poliuretano densità 40 alto 5 cm Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguento 11M		
Tipo di pistone	Pistone cromato a gas 140 mm		
Tipo di base con ruote	Base in alluminio Ø 50 cm con 5 ruote cromate		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		
Dimensioni MI476B MI476BLU - MI476N - MI476V			
Tipo di seduta	Seduta Ø 32 cm imbottita in poliuretano densità 40 alto 5 cm Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguento 11M		
Tipo di elevazione	Sistema a vite 140 mm		
Tipo di base	Base in plastica nera Ø 50 cm con 5 ruote in plastica		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		
Dimensioni MI477B MI477BLU - MI477N - MI477V			



Tipo di seduta	Seduta Ø 32 cm imbottita in poliuretano densità 40 alto 5 cm Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente 11M		
Tipo di pistone	Pistone verniciato nero a gas 140 mm		
Tipo di base	Base in plastica nera Ø 50 cm con 5 ruote in plastica		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		

Dimensioni MI478N	 L: 500 mm	 P: 500 mm	 H: 400÷530 mm
Tipo di seduta	Seduta L:33xP:35 cm in PU espanso con schienale H:15 cm		
Tipo di elevazione	Sistema a vite 140 mm		
Tipo di base	Base in plastica nera Ø 50 cm con 5 ruote in plastica		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		

Dimensioni MI479A	 L: 500 mm	 P: 500 mm	 H: 500÷700 mm
Tipo di seduta	Seduta Ø 35 cm - Acciaio inox		
Tipo di pistone	Pistone cromato a gas 200 mm		
Tipo di base	Base in alluminio Ø 50 cm con 5 ruote cromate		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		

Dimensioni MI476B MI476BLU - MI476N - MI476V	 L: 500 mm	 P: 500 mm	 H: 530÷730 mm
Tipo di seduta	Seduta Ø 32 cm imbottita in poliuretano densità 40 alto 5 cm Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente 11M		
Tipo di pistone	Pistone cromato a gas 200 mm		
Tipo di base	Base in alluminio Ø 50 cm con 5 ruote cromate		
 Peso sgabello	5 kg		
 Portata massima	150 kg		

Dimensioni MI480N	 L: 500 mm	 P: 500 mm	 H: 430÷580 mm
Tipo di seduta	Seduta a sella L:38 x P:34 cm in PU espanso		

Tipo di pistone	Pistone verniciato nero a gas 140 mm
Tipo di base con ruote	Base in plastica nera Ø 50 cm con 5 ruote in plastica
 Peso sgabello	5 kg
 Portata massima	150 kg

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto

15. RIPARAZIONI

15.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia

15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato

15.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione

16. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio

17. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso

**CERTIFICATO DI GARANZIA****Prodotto** _____**Acquistato in data** _____**Rivenditore** _____**Via** _____ **Località** _____**Venduto a** _____**Via** _____ **Località** _____ **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com