

Articolo **1515**

Categoria commerciale **GUAINETTE POST PARTO REGOLABILE**

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 60%  
 COTONE 20%  
 ELASTAN 20%

---

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE						COLORE / COLOUR
	2°	65	4°	75	6°	85
	3°	70	5°	80	7°	90

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Lavare con acqua tiepida e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi; per asciugare togliere più acqua possibile, arrotolando il prodotto in un asciugamano. Appendere all'ombra.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip. Regolare la contenitività tramite i rinforzi della parte anteriore.

Indicazioni

Aiuta a recuperare la figura.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.