

Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

Descrizione

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati in fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in cotone sanforizzato. Dispositivi dotati di fissaggi con chiusura a velcro.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

Indicazioni

Prevenzione del decubito per pazienti costretti su carrozzina allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

Controindicazioni precauzioni d'uso

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Composizione

Interno Fibra cava siliconata

Fodera Cotone 100% sanforizzato

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici



CA-200
45 x 43 cm
peso 650 gr



CA-201
45 x 43 cm
peso 750 gr



CA-202
45 x 43 cm
peso 680 gr



CA-203
48 x 43 cm
peso 600 gr



CA-204
45 x 40 cm
peso 650 gr

Come posizionare i cuscini

Appoggiare il cuscino prescelto sul telo seduta della carrozzina avendo cura che i fissaggi a velcro risultino posizionati dalla parte dello schienale. Assicurare quindi il cuscino ad una struttura rigida della carrozzina tramite i fissaggi a velcro.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti consumabili.

Codice nomenclatore

03.33.03.003

Lotto n.



**CUSCINI EASY
IN FIBRA CAVA SILICONATA**

Revisione 00, Agosto 2013

Made in ITALY



**CA-200
A TRE SEZIONI**



**CA-201
CON DEPRESSIONE
CENTRALE**



**CA-202
CON FORO CENTRALE**



**CA-203
A FERRO DI CAVALLO**



**CA-204
A CIAMBELLA**



Via Ludovico D'Aragona, 11 -20132 Milano (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



Dispositivo Medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE