

## INDICAZIONI PER L'UTENTE

**Questo prodotto serve esclusivamente da ausilio per l'equilibrio e sostegno. Non è progettato per sostenere tutto il peso di una persona. Prima di usare questo prodotto LEGGERE attentamente le avvertenze.**

### **ATTENZIONE: prima di usare il prodotto leggere attentamente le seguenti istruzioni!**

1. Se si è affetti da una malattia o una lesione oppure si assumono farmaci che pregiudicano il senso dell'equilibrio o la capacità di stare in piedi o seduti, prima di usare questo prodotto rivolgersi al proprio medico. Un uso non appropriato del prodotto può causare gravi lesioni o danni.
2. Il prodotto non è progettato per sopportare tutto il peso di una persona. Serve solo da aiuto per l'equilibrio e sostegno per sedersi e alzarsi.
3. Le istruzioni relative al prodotto devono essere seguite scrupolosamente per garantire che venga installato e assemblato correttamente. L'inosservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni all'utente/i.
4. Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto o vi si appendano.
5. Per il maniglione da letto è importante che il materasso sia sufficientemente pesante da bloccare il prodotto. Il maniglione da letto non è adatto per materassi in espanso leggeri e altri materassi leggeri e quindi non dovrebbe essere utilizzato con tali materassi. **ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:** né la Stander, Inc., né il produttore/commerciante rispondono dei danni o lesioni che possono essere ricondotti o sono dovuti a un uso o montaggio non appropriati del prodotto.

