



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Corsetto dorsale radrizzaspalle.

BAND-UP

Art. TO1100

**La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, funzionale e dinamico che estende e corregge la colonna vertebrale. Le spinte di sostegno a livello dorsale, caratterizzate dalla struttura metallica (stecche paravertebrale) e quella in tessuto con spillacci, sono studiate appositamente per sostenere il rachide dorsale, mantenendolo in una posizione fisiologicamente naturale, senza minimamente compromettere la normale respirazione.

Il peso molto ridotto e i tiranti elastici di chiusura, garantiscono un'adattamento anatomicamente perfetto. Di facile applicazione, risulta poco visibile e garantisce inoltre un'ottimale vestibilità.

CARATTERISTICHE

Tessuto elastico millerighe.

Stecche dorsali di sostegno.

Spillacci con imbottitura ascellare ed incrocio posteriore.

Chiusura anteriore a velcro.

Unisex.

INDICAZIONI

UTILE NELLA CORREZIONE DI ATTEGGIAMENTI CIFOTICI, DORSO CURVO E SCAPOLE ALATE • COADIUVANTE DORSALGIE POSTURALI PREVENZIONE IN OSTEOPOROSI.

APPLICAZIONE

- 1 Applicare il dispositivo al paziente in posizione eretta.
- 2 Tenere la parte alta posizionata parallelamente alla linea delle spalle e ben centrata sulla colonna vertebrale.
- 3 Far passare gli spillacci imbottiti sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente ed infine fissarli sul velcro centrale anteriore.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.