



## Corsetto lombare

**NEW BERNA**

**ART. TO1110**

### La cura della schiena in tutta sicurezza, leggera e confortevole

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione. La struttura realizzata in tessuto elastico traspirante calibrato, lo rendono utile per il controllo di lievi patologie che interessano il tratto lombare. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura il corretto sostegno alla schiena e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane. Il taglio particolare, inoltre, insieme alla sovra citata traspirabilità, lo rendono adatto alla pratica sportiva, inclusi gli sport acquatici grazie all'idrorepellenza del tessuto.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto spacer, elastico, 100% traspirante e resistente ai liquidi. Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori, regolabili in altezza per una distribuzione ottimale della spinta lombare. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia.

#### INDICAZIONI

PREVENZIONE • LOMBALGIE • LOMBO SCIATALGIE • CONTRATTURE MUSCOLARI • SOSTEGNO NELLO SPORT E NELLA VITA QUOTIDIANA • TRAUMI LIEVI DELLA COLONNA LOMBARE • SPONDILOARTROSI • DISCOPATIE • CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI • UTILE NELLE LOMBALGIE DA AUTOMOBILE.

#### APPLICAZIONE

1. Aprire il corsetto completamente, tenendo l'asola per il pollice verso l'alto.
2. Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali "obliqui piccoli").
3. Indossare il corsetto e chiudere il velcro addominale quanto basta per stabilizzarlo correttamente.
4. Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui.
5. Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente. Regolare l'altezza posteriore dei tiranti per ottimizzare la distribuzione della spinta.
6. Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo inferiore posteriore del corsetto, sia posizionato circa a metà glutei.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.