



**TENORTHO**  
Un punto fermo per tornare a muoversi

## Immobilizzatore di spalla

**NOLUX III® ART. TO2102 CI**

### Immobilizzazione del tronco in modo sicuro e confortevole

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura caratterizzata da un reggi braccio ed una fascia con chiusura a velcro ed i tiranti regolabili ad ogni misura necessaria, permettono un'applicazione immediata evitando ulteriori complicazioni. La base imbottita, oltre a garantire il fissaggio delle cinghie mezzo velcro, fornisce un'ulteriore strumento di stabilizzazione. Facile da indossare, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

#### CARATTERISTICHE

Tiranti regolabili in lunghezza. Base in tessuto accoppiato per fissaggio tiranti ed una maggiore stabilità dell'articolazione. Fascia in accoppiato con chiusura a velcro per stabilizzazione finale. Universale.

#### INDICAZIONI

FRATTURE COMPOSTE DELL'OMERO • DISTORSIONI DELLA SPALLA • LUSSAZIONI GLENO-OME-RALI • POST-OPERATORIO DELLE TENORRAFIE DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE.

#### APPLICAZIONE

- 1 Infilare il braccio nella sacca.
- 2 Incrociare posteriormente i tiranti e portarli fino a raggiungere la base della tasca reggi braccio fissandoli sulla sacca stessa
- 4 Mantenere il braccio in una posizione di 90°.
- 5 Fissare la fascia orizzontale col velcro.
- 6 Concludere girando la fascia intorno al braccio da immobilizzare e fissandola su se stessa con l'apposito velcro di chiusura.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.