

# TENortho

Un punto fermo per tornare a muoversi

Reggi braccio semplice.

## SOLLIEVO

Art. TO2109

### La cura del corpo in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in cotone ed il tirante regolabile velocemente permettono un'applicazione immediata evitando ulteriori complicazioni. Facile da indossare, assicura l'aiuto necessario, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto in cotone.  
Asola per pollice.  
Fascia regolabile in lunghezza tramite fibbia.  
Imbottitura di protezione.

#### INDICAZIONI

FRATTURA • CONTUSIONE • BORSITI • POST-OPERATORIO.

#### APPLICAZIONE

- 1 Infilare il braccio nella sacca.
- 2 Regolare la fascia fino a raggiungere un angolo di 90° tra avambraccio e omero.
- 3 Infilare la fascia nell'imbottitura e successivamente portarla a livello spalla/clavicola.
- 4 Se necessario, posizionare il pollice nell'apposita asola.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.  
Asciugare lontano da fonti di calore.  
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.  
Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.  
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.  
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.  
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.