



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Tutore per epicondilite con pressore.

EPIC

Art. TO2108

**La cura del gomito in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad alta tenuta e C6Tex, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in unico corpo in materiale elasticizzato, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura del dolore da infiammazione a livello epicondilare. Facile da indossare, grazie alla pratica chiusura, risulta anatomicamente avvolgente ed assicura l'azione necessaria procurando benessere e sollievo nelle attività quotidiane oltre che nello sport.

CARATTERISTICHE

Tessuto in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad alta tenuta e C6Tex.
Pressore integrato in materiale espanso.
Passante integrato per controllo della trazione.
Chiusura a velcro. Bordo elastico di rifinitura.

INDICAZIONI

EPICONDILITI ACUTE O CRONICHE • EPITROCLEITI • CONTRATTURE MUSCOLARI.

APPLICAZIONE

1. Aprire il cinturino in velcro.
2. Infilare il tutore fino a tenere il bordo esterno a circa 3 cm (due dita) dal centro dell'articolazione del gomito.
3. Posizionare il pressore sull'asse della zona infiammata.
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino quanto basta.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.