



Polsiera steccata in tessuto elastico.

PF

Art. TO2200

La cura del polso in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto elastico calibrato e i velcri di chiusura, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei traumi al polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto elastico calibrato.
Chiusura a velcro.
Stecca anatomica in alluminio (modellabile).

INDICAZIONI

DISTORSIONI • TENDINITI • ARTRITE REUMATOIDE • ARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire la polsiera completamente.
- 2 Posizionare la zona concava sul palmo della mano a livello del pollice.
- 3 Fissare sequenzialmente i velcri di chiusura, iniziando dalla mano (dorso).
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.