

Tutore steccato per pollice.

RHIZOTEN

Art. TO2205

La cura del pollice in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico traspirante, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto traspirante tridimensionale e le chiusure a velcro elastico, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura del pollice. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma anatomicamente avvolgente della stecca in alluminio (modellabile), assicura l'immobilizzazione necessaria e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Struttura in tessuto tridimensionale traspirante.
Stecca in alluminio presagomata, modellabile.
Chiusura a velcro elastico.
Universale.

INDICAZIONI

TENDINITI • TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN • RIZARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA DI BENNET • LESIONE DI STEINER • POST OPERATORIO.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini in velcro.
- 2 Appoggiare il tutore sul lato esterno del pollice.
- 3 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato.
- 4 Stringere i cinturini in velcro partendo dal pollice stesso.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.