



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Ortesi rigida per pollice, con fori d'aerazione.

RHIZOFIT

Art. TO2301

La cura del pollice in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico traspirante, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in materiale plastico forato, il guantino protettivo e la chiusura a velcro fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura del pollice. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma anatomicamente avvolgente, assicura l'immobilizzazione necessaria e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Struttura plastica forata per la traspirazione.
Guantino protettivo in cotone e viscosa antibatterico.
Chiusura a velcro.

INDICAZIONI

TENDINITI • TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN • RIZARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA DI BENNET • LESIONE DI STEINER • POST OPERATORIO.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire il cinturino in velcro.
- 2 Se necessario, indossare il guantino protettivo.
- 3 Infilare il tutore nel pollice.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino in velcro.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.