



## Ginocchiera in tessuto spacer con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo dinamico

**NEWMESH**

**ART. TO3104N**

### La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione, anche grazie alla steccatura latero/mediale. La struttura in tessuto spacer garantisce tenuta, compressione ed una traspirazione al 100%. Lo stabilizzatore rotuleo dinamico (a trazione controllata) è necessario per ottenere una maggiore stabilizzazione dell'articolazione femoro-rotulea durante la flessione-estensione. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile applicazione. Utile anche nell'attività sportiva.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto spacer, elastico, 100% traspirante e resistente ai liquidi. Stecche a spirale in acciaio rivestito. Foro rotuleo con rinforzo. Stabilizzatore rotuleo dinamico a trazione controllata e fissaggio a velcro.

#### INDICAZIONI

SUBLUSSAZIONI E DISLOCAZIONI LATERALI DELLA ROTULA • PREVENZIONE DELLE LESIONI DEL GINOCCHIO • STABILIZZAZIONE LATERO-MEDIALE • PROTEZIONE DA TENSIONI ANOMALE SULLA ROTULA • PREVENZIONE DURANTE PRATICA SPORTIVA • PROCESSI INFIAMMATORI • DOLORI AL LEGAMENTO ROTULEO • POST-OPERATORIA • MORBO DI OSGOOD-SCHLATTER • CONDROMALACIA • ARTROSI FEMORO ROTULEE.

#### APPLICAZIONE

1. Posizionare il tutore con il logo "tenortho" rivolto anteriormente e verso l'alto.
2. Infilare il tubolare fino a raggiungere con il foro la rotula.
3. Assicurarsi che la rotula sia ben centrata nel foro.
4. Trazionare quanto serve, lo stabilizzatore, partendo dalla fascia più bassa e agganciarla a velcro sul copri stecche opposto.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.