



Ginocchiera in tessuto spacer con stabilizzatore rotuleo e stecche a spirale

NEWMESH

ART. TO3105N

La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione, anche grazie alla steccatura latero/mediale. La struttura in tessuto spacer garantisce tenuta, compressione ed una traspirazione al 100%. Lo stabilizzatore rotuleo è necessario per ottenere una maggiore stabilizzazione dell'articolazione femoro-rotulea durante la flessione-estensione.

Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile applicazione.

Utile anche nell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE

Tessuto spacer, elastico, 100% traspirante e resistente ai liquidi. Stecche a spirale in acciaio rivestito. Foro rotuleo con stabilizzatore multidirezionale.

Alette di chiusura evitano l'effetto "laccio".

INDICAZIONI

PREVENZIONE DELLE LESIONI DEL GINOCCHIO • STABILIZZAZIONE LATERO-MEDIALE •
PROTEZIONE DA TENSIONI ANOMALE SUL GINOCCHIO LESO IN VIA DI GUARIGIONE •
PREVENZIONE DURANTE PRATICA SPORTIVA.

APPLICAZIONE

1. Posizionare il tutore con il logo "tenortho" rivolto anteriormente e verso l'alto.
2. Infilare il tubolare fino a raggiungere con il foro la rotula.
3. Assicurarsi che la rotula sia ben centrata nel foro.
4. Stringere le alette di chiusura partendo dal basso.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.