



GINOCCHIERA "CORTA" IN TESSUTO SPACER CON ASTE ARTICOLATE E REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE.

NEWMESH

ART. TO3109N

La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione. La struttura in tessuto spacer garantisce tenuta, compressione ed una traspirazione al 100%; le aste articolate con possibilità di regolazione permettono, in caso di necessità, di limitare la flessione-estensione accompagnando e proteggendo l'articolazione durante il movimento. Lo stabilizzatore rotuleo, se necessario, serve per ottenere una maggiore stabilizzazione dell'articolazione femoro-rotulea durante la flessione-estensione. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica. Utile anche nell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE

Tessuto spacer, elastico, 100% traspirante e resistente ai liquidi.

Foro rotuleo con rinforzo.

Aste policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° (0°-15°-30°-60°-90°).

Guaine in pelle per l'inserimento delle aste.

Alette di chiusura evitano l'effetto "laccio".

INDICAZIONI

TRAUMI DISTORSIVI DEL GINOCCHIO • CONDROMALACIA ROTULEA ASSOCIATA A LASSITÀ LEGAMENTOSA • INSTABILITÀ LATERO/MEDIALE • PREVENZIONE DEI TRAUMIDISTORSIVI • INSTABILITÀ ARTROSICA • COADIUVANTE NELLA TERAPIA DEL GINOCCHIO ARTROSICO NON OPERABILE • PREVENZIONE NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA.

APPLICAZIONE

1. Posizionare il tutore con il logo "tenortho" rivolto anteriormente e verso l'alto.
2. Infilare il tubolare fino a raggiungere con il foro la rotula.
3. Assicurarsi che la rotula sia ben centrata nel foro.
4. Stringere le alette di chiusura partendo dal basso.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.