



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Cinturino sottorotuleo in neoprene.

T&ON

Art. TO3101

La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad alta tenuta C6Tex, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in unico corpo in materiale elasticizzato, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura del dolore da infiammazione sottorotulea. Facile da indossare, grazie alla pratica chiusura, risulta anatomicamente avvolgente ed assicura l'azione necessaria, procurando benessere e sollievo nelle attività quotidiane e nello sport.

CARATTERISTICHE

Tessuto in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad alta tenuta e C6Tex.
Pressore integrato in materiale espanso.
Passante integrato per controllo della trazione.
Chiusura a velcro. Bordo elastico di rifinitura.

INDICAZIONI

TENDINITI • MORBO DI OSGOOD-SCHLATTER • INFIAMMAZIONI • TENDINOPATIE.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire il cinturino.
- 2 Tenere il ginocchio leggermente flesso e posizionare il pressore appena sotto la rotula, in posizione centrale.
- 3 Inserire la fascia destra nell'asoletta situata nella zona laterale sinistra del tutore.
- 4 Inserire le due fasce nelle fibbie di ritorno e fissarle con il velcro.
- 5 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino quanto basta.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.