

Immobilizzatore di ginocchio.

**LOCKALL**

Art. TO3200

## La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria immobilizzazione dell'articolazione dopo un trauma o un intervento chirurgico. La struttura a tre pannelli bifoderati (cotone garzato esternamente e maglina assorbente internamente) in materiale espanso a soft density e la capacità contenitiva delle aste in alluminio (modellabili), assicurano una stabilità articolare paragonabile all'ingessatura, ma con un confort assolutamente eccezionale. Il sistema di chiusura a fasce in velcro evita la migrazione e la rotazione del tutore stesso. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile rimozione, anche per la continua igiene personale.

### CARATTERISTICHE

Struttura in morbido espanso bifoderato. Rivestimento interno in cotone assorbente. Aste rigide mediali, laterali e posteriori in lega leggera modellabili. Pannelli mediale e laterale regolabili. Apertura rotulea. Lavabile. Leggero e confortevole.

### INDICAZIONI

UTILE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PRONTO SOCCORSO • VALIDO SOSTITUTO DELL'IMMOBILIZZAZIONE GESSATA IN CORSO DI DISTORSIONI LIEVI O DI FRATTURA COMPOSTA DI ROTULA.

### APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.
- 2 Regolare i pannelli laterali tramite velcro posizionando le aste seguendo bene la linea mediana della gamba.
- 3 Se necessario, modellare le aste seguendo il profilo anatomico della gamba.
- 4 Applicare la ginocchiera centrando il foro anteriore sulla rotula.
- 5 Stringere e fissare i cinturini a velcro in sequenza alternata (coscia/gamba) partendo da quelli più vicini al centro ginocchio (rotula).

### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.