



Cavigliera in tessuto spacer con stabilizzatore latero/mediale.

NEW GAMMA

Art. TO4102N

La cura del corpo in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione. La struttura in NEOMESH (neoprene ortopedico bifoderato e airmesh) garantisce un'ottima tenuta e la compressione necessaria alla normale attività fisiologica. I sostegni laterali e l'incrocio in tessuto elastico velcrabile, formano un'ottima soluzione alla prevenzione di possibili distorsioni. L' Airmesh riduce notevolmente la sudorazione. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile applicazione. Utile anche nell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE

Tessuto 3D 100% traspirante. Piede e parte posteriore in AIRMESH traspirante 100% e di spessore impercettibile. Tirante elastico per stabilizzazione latero/mediale multi direzionale. Bordo elastico di rifinitura. Stecche latero/mediali di sostegno.

INDICAZIONI

DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA • ARTROSI DELLA TIBIO-TARSICA • TENDINITI DELLA CAVIGLIA • TENDINOPATIE DEI PERONEI • PREVENZIONE DEI TRAUMI ACCIDENTALI DELLA CAVIGLIA NELLO SPORT • UTILE NELLA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA.

APPLICAZIONE

- 1 Calzare il tutore .
- 2 Chiudere i lembi superiori (gamba) con gli appositi velcri.
- 3 Tendere il primo tirante elastico, farlo passare sul collo del piede e sotto la pianta per fissarlo poi, al velcro copristecche opposto.
- 4 Ripetere l'operazione con il secondo tirante.
- 5 Chiudere la fascia superiore di sicurezza.
- 6 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stretto quanto basta.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone