



Supporto dinamico per piede ciondolante

DYNUP

Art. TO4107

La cura del corpo in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto dinamico per piede ciondolante ed altre patologie in cui sia richiesto un supporto leggero alla dorsi-flessione.

Facile da indossare e con un'ottima vestibilità, è realizzato in tessuto con fibra di carbonio C6Tex: antistatico, traspirante, termoregolatore, batteriostatico, ipoallergenico e performante, assicura il corretto sostegno nelle attività quotidiane.

Il tutore è composto da 3 fasce: una presa ergonomica sotto ginocchio, una presa piede ed un tirante elastico che connette entrambe le fasce e che conferisce la funzionalità al prodotto.

CARATTERISTICHE

Tessuto con fibra di carbonio C6Tex, elastico e 100% traspirante.

La fibra di carbonio C6Tex che combina ottime prestazioni meccaniche con leggerezza ed elasticità. Chiusure con regolazione a velcro, che permettono al supporto di essere dinamico e versatile.

INDICAZIONI

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE • EQUINISMI SPASTICI DI LIEVE ENTITÀ • PRONAZIONE O SUPINAZIONE DEL PIEDE

APPLICAZIONE

1. Fissare la prima fascia (più lunga) intorno al polpaccio, esattamente sotto il ginocchio.
2. Fissare la seconda fascia intorno al piede, immediatamente dietro all'avampiede
3. Connettere i due elementi tramite il tirante elastico, agganciandolo nei lati opposti della due fasce e facendo una sorta di spirale attorno al polpaccio (parte sinistra sotto piede-parte destra sotto ginocchio / parte destra sotto piede-parte sinistra sotto ginocchio).

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.