



Tutore AFO per piede equino (ciondolante).

SPRINGY

Art. TO4302

**La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in un particolare mix di materiali plastici, la pratica chiusura a velcro, fanno di questo tutore la soluzione immediata alle necessità quotidiane. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma anatomicamente avvolgente, assicura la giusta spinta nelle attività giornaliere.

CARATTERISTICHE

Struttura plastica anatomicamente avvolgente
Imbottitura di protezione al polpaccio
Chiusura a velcro.
Se strettamente necessario, modificabile a caldo.

INDICAZIONI

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE • EQUINISMI SPASTICI DI MEDIA ENTITA'.

APPLICAZIONE

- 1 Infilare il tutore nella calzatura.
- 2 Indossare la scarpa con il tutore.
- 3 Avvolgere l'imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino a velcro.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data
27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com