



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Corsetto dorso-lombare.

AGILOMB TO1105

La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione unico nel suo genere. Il design innovativo, la struttura realizzata in "Resistex combinato" Antistatico, Traspirante e Termoregolatore, Batteriostatico e Ipoallergenico, Performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Tessuto elasticizzato, esclusiva TENORTHO nel settore ortopedico. Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di patologie che interessano il tratto dorso-lombare. Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Materiale "Resistex combinato"; Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (Durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata. Parte dorso-lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua. Spallacci imbottiti per correzione postura dorsale

INDICAZIONI

OSTEOPOROSI • OSTEOMALACIA • CIFOSI DORSALE • OSTEOLISI • ESITI DI FRATTURE VERTEBRALI DEL TRATTO DORSO-LOMBARE • DORSALGIE.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire il corsetto completamente tenendo l'asola per il pollice verso l'alto. (fig. 1)
- 2 Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande"; 2 laterali "obliqui piccoli").
- 3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui.
- 4 Indossare il corsetto e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo correttamente. (fig. 1)
- 5 Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente. (fig. 2)
- 6 Agganciare prima i velcri inferiori e successivamente i superiori. (fig. 2)
- 7 Per applicarlo correttamente, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà glutei. (fig. 3)
- 8 Far passare i tiranti uso spalline sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente ed infine fissarli sul velcro dei tiranti superiori/anteriori. (fig. 3)

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritta dal medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

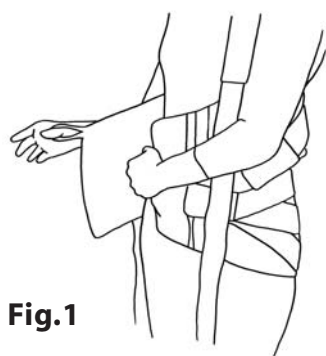


Fig.1



Fig.2



Fig.3