

ALZAMI WC EB1

Istruzioni d'uso e manutenzione



questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Termigea s.r.l.

Sede: Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI)
TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – info@termigea.it



Importante



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente a **Termigea s.r.l.**

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto **Termigea®**

1. AVVISI PER LA SICUREZZA	3
2. DESTINAZIONE PREVISTA	3
3. SCHEDA TECNICA	3
4. ETICHETTATURA	3
5. INSTALLAZIONE	3
6. USO	3
7. PULIZIA E MANUTENZIONE	4
8. DEPOSITO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9. SMALTIMENTO	5
10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DISPOSITIVO MEDICO	6
11. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA	7
12. MODULO DI RESO	9

1. Avvisi per la sicurezza

- ☞ Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- ☞ Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.
- ☞ Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- ☞ Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate immediatamente il Vs. rivenditore.

2. Destinazione prevista

Sollevatore automatico per WC che consente all'utente con mobilità ridotta di alzarsi e sedersi in maniera autonoma durante l'utilizzo della toilette.

3. Scheda tecnica

Particolari tecnici

Peso massimo sopportato 130 kg

Peso del prodotto 37 kg

Dimensioni

Larghezza foro	23 cm
Larghezza foro interno ciambella	25 cm
Larghezza totale del prodotto	65 cm
Altezza minima del sedile	48 cm
Altezza massima del sedile	59 cm
Altezza totale	82 cm
Profondità totale con braccioli	57 cm
Profondità totale senza braccioli	47 cm
Larghezza totale	65 cm

4. Etichettatura



5. Installazione

Il montaggio e/o lo smontaggio del sollevatore deve essere effettuato da personale tecnico abilitato onde evitare danni meccanici e/o elettrici al prodotto. Normalmente il sollevatore viene fornito già montato e pronto all'uso; l'utente deve solo connetterlo alla rete elettrica.

ATTENZIONE! Non effettuare alcuna operazione sotto tensione.

ATTENZIONE! Le operazioni di installazione devono essere effettuate, esclusivamente, da personale autorizzato.

ATTENZIONE! Si declina ogni responsabilità circa malfunzionamenti o danni derivanti da cattiva installazione e messa in opera da personale non abilitato.

Consigli :


Prima di connettere la spina elettrica alla rete, accertarsi che non ci sia alcuna forma di incompatibilità elettrica e di insicurezza per l'utente.

Usare cavi elettrici di sezione non inferiore a quelli in dotazione.

Prima di effettuare un qualsiasi intervento di manutenzione, accertarsi di aver scollegato l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Leggere attentamente le operazioni ivi descritte, non effettuando alcuna azione, se la comprensione delle stesse non è chiara.

Prima del primo utilizzo della seduta elevatrice per WC o dopo un lungo periodo di inattività (generalmente 7-10 giorni), ricaricare completamente i pacchi batterie come segue. Una batteria scarica richiede un tempo di ricarica di circa 5 ore.

6. Uso

 **Avviso:** Tutti i riferimenti nelle presenti istruzioni operative a SINISTRA e DESTRA si intendono dalla prospettiva dell'utente seduto sulla seduta elevatrice per WC, GLI utenti o assistenti che adoperano la seduta elevatrice stando in piedi rivolti verso il prodotto devono pertanto adottare la prospettiva inversa.

All'estremità dei braccioli sono presenti 2 pulsanti di comando (pulsante rosso all'estremità destra e pulsante verde all'estremità sinistra)

Il pulsante rosso aziona il sollevamento dell'alza WC, il pulsante verde aziona la discesa dall'alza wc.

Sia il sollevamento che la discesa possono essere interrotti sospendendo la pressione sul relativo pulsante. Entrambe le movimentazioni sono dotate di fine corsa di sicurezza automatico.

Con particolare riferimento alla fase di sollevamento, fare attenzione particolare che la superficie del pavimento non sia bagnato e/o scivolosa.

7. Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Per la pulizia delle parti elettriche è vietato l'uso di liquidi, sostanze lubrificanti e/o sostanze detergenti infiammabili.

Manutenzione straordinaria a cura di personale specializzato

Per eventuali anomalie di funzionamento ed interventi particolari, richiedere l'assistenza al proprio rivenditore.

Pulire l'alza WC con la stessa frequenza con cui si pulisce il water, con detergenti per bagno delicati e non abrasivi. Se la seduta elevatrice è utilizzata da più persone, si consiglia di disinfettare dopo ogni utilizzo. **NON** utilizzare detergenti a base di SOLVENTI, tipo acqua ragia, che potrebbero danneggiare la seduta e le superfici delle coperture.

Per disinfettare la seduta elevatrice, utilizzare una spazzola morbida oppure un panno morbido e pulire con una soluzione sterilizzante o un detergente antibatterico. Utilizzare la stessa concentrazione impiegata per altre superfici domestiche, come lavabi e vasche.

Strofinare quindi asciugare con un panno asciutto e pulito.

Manutenzione e assistenza:

L'alza WC non è dotata di parti riparabili dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono essere affidate a un tecnico autorizzato.

Far controllare annualmente la seduta elevatrice per WC da un tecnico autorizzato, per verificare che non vi siano raccordi allentati e altri segni di danni meccanici.

Controllare anche l'area della base o il pavimento per accertarsi che siano

perfettamente sicuri per l'uso della seduta elevatrice.

Manutenzione ordinaria:

Si consiglia di effettuare la pulizia del rivestimento esterno del alza WC, settimanalmente con un panno asciutto o leggermente umido e privo di detergenti chimici. Per la manutenzione delle parti meccaniche lubrificare gli snodi del meccanismo con grasso al silicone spray ogni 6 mesi.

Controlli visivi:

- ☞ Verificare l'efficienza e l'integrità del cavo di alimentazione;

ATTENZIONE! Per la pulizia delle parti elettriche è vietato l'uso di liquidi, sostanze lubrificanti e/o sostanze detergenti infiammabili.

Manutenzione straordinaria a cura di personale specializzato

8. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

10. Dichiarazione di Conformità per il Dispositivo Medico

ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.



La scrivente **Termigea S.r.l.** con Sede in Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI) - Italia, fabbricante del dispositivo medico denominato

“EB1 – ALZAMI WC”

dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi di cui all'oggetto soddisfano tutti i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.

A tale scopo garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. Che i dispositivi in oggetto soddisfano le disposizioni applicabili della Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dei relativi recepimenti italiani.
2. Che i **dispositivi** in oggetto sono da considerarsi come **appartenenti alla Classe I** delle Direttive suddette.
3. Che i dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE.
4. Che si impegna conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo il Fascicolo Tecnico di prodotto, specificato all'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE di riferimento, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di immissione in commercio dell'ultimo lotto o matricola di dispositivi indicati.
5. Che i dispositivi sono progettati, fabbricati e posti in commercio secondo quanto dichiarato nel fascicolo tecnico di prodotto.
6. Che **Termigea S.r.l.** ha già provveduto a notificare all'Autorità Competente Italiana la messa in commercio dei dispositivi succitati. Dichiara inoltre di avere istituito e di mantenere un'ideale procedura per garantire la sorveglianza post-vendita richiesta dalla Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dai relativi recepimenti italiani.

Il contenuto della presente dichiarazione di conformità viene confermato ad ogni rilascio di lotto o matricola di dispositivi indicati, prodotti a partire dal 01/06/2018.

Allegati: Garanzia / Scheda Tecnica.

Data di emissione della dichiarazione: 01/06/2018

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della marcatura di cui alla presente dichiarazione, si prega di contattare il n° telefonico +39 050 878741 o indirizzo e-mail info@termigea.it.

In fede

Termigea S.r.l.

Il legale rappresentante

Dr. Massimo Bellomini

11. Termini e condizioni di garanzia

11.1. Oggetto

Termigea S.r.l., Via Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI), Italia ("Termigea"), garantisce i propri prodotti contro ogni difetto di fabbricazione e contro ogni difetto di conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di vendita e/o nelle "Istruzioni d'uso e manutenzione" del singolo prodotto.

I difetti coperti dalla presente garanzia sono esclusivamente quelli già presenti al momento della consegna del prodotto.

11.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre i difetti sopravvenuti successivamente alla consegna, né i difetti già evidenti o rilevabili al momento dell'acquisto con l'uso della normale diligenza.

La presente garanzia non copre altresì i difetti derivanti da:

- ☞ normale usura;
- ☞ montaggio imperfetto o errato per mancato rispetto o non corretta esecuzione delle apposite Istruzioni.
- ☞ impropria manutenzione, non conforme alle istruzioni fornite da Termigea e allegate alla presente garanzia.
- ☞ danni o deterioramento della superficie esterna, finitura o apparenza estetica del prodotto per impropria manutenzione o lavaggio (ad. es. con alcool, solventi chimici, strumenti abrasivi o comunque in modo non conforme a quanto prescritto nelle apposite istruzioni);
- ☞ manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio del prodotto;
- ☞ danni causati da colpi, urti, incidenti;
- ☞ danni causati da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo;
- ☞ danni causati da incidenti nella fase di spedizione o trasporto, incluso lo smarrimento del prodotto;

L'acquirente non ha diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia nel caso in cui il prodotto sia stato riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche e alterazioni siano state espressamente autorizzate per iscritto da Termigea.

Sono a carico dell'acquirente:

- ☞ le spese di trasporto del prodotto da/a un rivenditore autorizzato
- ☞ i costi di manodopera necessari per disinstallare il prodotto e/o sue componenti.

Non sono altresì coperti dalla presente garanzia i danni per il mancato utilizzo del prodotto durante il periodo necessario per la riparazione o la sostituzione.

Il prodotto oggetto della presente garanzia (o parti dello stesso) non sarà mai considerato "difettoso" per gli effetti della presente garanzia qualora esso (o sue parti) si discordi dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa entrata in vigore successivamente alla data di acquisto, o comunque stabiliti da normativa in qualsiasi tempo in vigore al di fuori del territorio italiano. Pertanto, eventuali adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti) a tali livelli qualitativi/tecnici non sono compresi nella presente garanzia.

11.3. Prestazioni oggetto della garanzia

Il prodotto riconosciuto difettoso da Termigea verrà riparato o sostituito a discrezione di Termigea a titolo gratuito entro 30 gg lavorativi (salvo ritardi imputabili ai fornitori) dalla data di ricevimento della merce. In nessun caso sarà riconosciuta all'acquirente una riduzione del prezzo d'acquisto.

L'esecuzione di qualsiasi servizio di riparazione o sostituzione in virtù della presente garanzia non costituisce ammissione o accettazione della non conformità del prodotto o della responsabilità di Termigea in merito al difetto riscontrato.

11.4. Procedura

Qualora l'acquirente riscontri un difetto del prodotto coperto dalla presente garanzia, per ottenere le prestazioni previste a carico di Termigea, è tenuto a restituire il prodotto difettoso al proprio negoziante.

Il prodotto difettoso dovrà essere restituito nel proprio imballaggio originale accompagnato dall'apposito "Modulo di reso" debitamente compilato e controfirmato oltre che dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto e la data d'acquisto al dettaglio.

Il materiale va spedito in porto franco (il pagamento del trasporto è a carico del mittente), salvo diversa indicazione a: **Termigea srl Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI)**

Termigea ha diritto di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni presenti sui documenti comprovanti l'acquisto sono state alterate o cancellate dopo l'acquisto da parte dell'acquirente, o mancano nel momento della richiesta della riparazione/sostituzione. Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al mittente.

Qualora il prodotto di cui si chiede la riparazione o sostituzione non presenti alcun difetto, le spese di controllo, di intervento e di spedizione saranno a carico dell'acquirente.

Termigea declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti o smarrimenti della merce spedita o resa al cliente.

11.5. Termini

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti manifestati entro e non oltre il termine di due (2) anni dalla data di consegna del prodotto (quale risulta dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto o dalla bolla di consegna, se posteriore). L'acquirente decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia il difetto del prodotto entro il termine di trenta (30) giorni dalla data in cui è stato scoperto.

11.6. Estensione territoriale

La presente garanzia copre i difetti dei prodotti Termigea venduti/acquistati in tutto il mondo.

11.7. Esclusività e prevalenza

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno resi per iscritto o oralmente da Termigea, e regola per intero l'impegno di Termigea nei confronti dell'acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto, qualora il medesimo presenti difetti coperti dalla presente garanzia.

11.8. Divieto di cessione

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della presente garanzia non sono cedibili.

11.9. Modifiche

Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente di Termigea è autorizzato a modificare, estendere o ampliare le condizioni e i termini di cui alla presente garanzia.

11.10. Legislazione applicabile e foro di competenza

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Eventuali controversie relative all'interpretazione, validità applicazione della presente garanzia saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa (PI), Italia.

11.11. Avvertenza

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto ivi contenute.



12. Modulo di reso

Data ____/____/____

Cliente: _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

Telefono: _____ email: _____

Codice Prodotto: _____ N° Fattura _____ Data Fattura _____

Descrizione dettagliata del difetto / Motivo del reso
.....
.....
.....
.....

Firma leggibile del Cliente

Riservato a Termigea srl
Reso n ° del _____ Firma dell'incaricato per accettazione delle condizioni di garanzia _____