

Articolo

9696



Categoria commerciale

REGGISENI POST-OPERATORI

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE 77%
POLIAMMIDE 13%
ELASTAN 10%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
M	80-86	XL	92-96
L	86-92	XXL	96-106

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 60 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Asciugare nell'asciugatrice con il programma delicato.	Non stirare.	Non lavare a secco.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale reggiseno.

Indicazioni

Post interventi operatori al seno di natura riduttiva o ricostruttiva.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.