
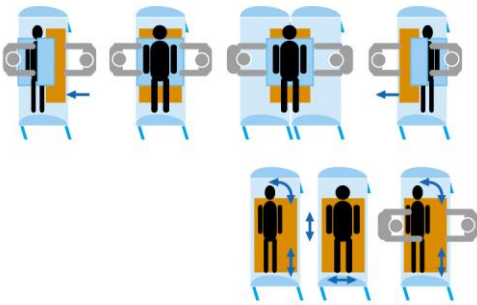



Albo Land srl

Via Mastroianni,9
40013 Castel Maggiore BO (Italy)
Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877
P.IVA: 01778301208
Capitale Sociale €12000 I.V.
www.alboland.com info@alboland.com
R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

ALBO *Land*™
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF 739	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. VEDI LOTTO	Ultima modifica. 06/06/2018
MATERASSINO TUBOLARE DA LETTO AD ALTO SCORRIMENTO			
			
MISURE: CM 140 X 85		COLORE: BLU	
COMPOSIZIONE: ESTERNO: 100% PA – INTERNO 100% PES.		LAVAGGIO: LAVARE COME FOSSE UN CAPO DELICATO, NON CANDEGGIARE E NON STIRARE. ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
INDICAZIONI: MORBIDO TUBOLARE IMBOTTITO, TESSUTO INTERNO IN NYLON AD ALTO SCORRIMENTO. OTTIMO PER IL POSIZIONAMENTO E LA MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE ALLETTATO. FACILITA IL LAVORO DEGLI OPERATORI EVITANDO ATRITI CON IL MATERASSO. PREVIENE IL RISCHIO DI PIAGHE DA DECUBITO.			
ISTRUZIONI: Il materassino può rimanere posizionato sul letto sopra le lenzuola con la cucitura dei galloni neri rivolta verso l'alto. Per evitare lo scivolamento del paziente il materassino deve essere fissato alla testata del letto tramite i galloni (staccare la fibbia, fissare ogni gallone alla struttura del letto facendolo passare all'interno della asola e quindi attaccare la fibbia al materassino). Per la movimentazione o trasferimento da un letto ad un altro, staccare le fibbie di fissaggio. Come da figura, il materassino facilita la movimentazione in tutte le direzioni. Per posizionare il paziente sul lato, inserire le mani sotto al paziente, quindi impugnando il materassino tirare dolcemente verso di sé. Ideale per lungodegenze ed uso domiciliare.			
CONFEZIONE: BUSTA DI PLASTICA		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI USO.		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONALE ESPERTO.	
739 N° progressivo: 342057 GMDM: 37163 CND: V0899		