

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21012_CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOFLEX_P361CXXXX1HW

NOME PRODOTTO	CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOFLEX
----------------------	--------------------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Cuscino a forma anatomica con stabilizzatori laterali e frontali, in polimero cellulare viscoelastico ad alta densità in grado di memorizzare la sagoma del corpo; ciò determina una netta diminuzione delle pressioni transcutanee aumentando i punti di appoggio e migliorando, quindi, la circolazione sanguigna. I canali di areazione ottimizzano il microclima. La copertura di cui è dotato è di materiale traspirante al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi per permettere una semplice pulizia ed un buon comfort del paziente evitando macerazione della cute.</p> <p>La bi-elasticità della fodera permette di ridurre le forze di frizione e taglio causa di lesioni cutanee. La schiuma viscoelastica da cui è composto permette un perfetto adattamento del supporto alla morfologia del paziente, distribuendo le pressioni di contatto eliminando eventuali punti di pressione dannosi.</p> <p>Indicazioni di utilizzo: presenza di lesioni dal I al II stadio (EPUAP) (con riposizionamento) e/o presenza di un elevato rischio di sviluppo di piaghe</p> <p>Densità del polimero viscoelastico: 80 Kg/m³</p> <p>Permeabilità della copertura: > 240 g/m² 24h</p> <p>Materiali Cuscino: Polimero viscoelastico ad alta densità Copertura: Polymaille</p> <p>Pulizia/decontaminazione/disinfezione: Cuscino: Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave.</p> <p>Copertura: Lavare a 95°C, non utilizzare candeggina, non stirare. Lavaggio a secco con solventi tipo P. Asciugare in asciugatrice a temperature moderate.</p>
--	--

DESTINAZIONE D'USO	Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.
---------------------------	--

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P361C36361HW	CUSCINO VISCOFLEX 36 x 36 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 50 Kg BD/RDM: 1504063 CND: Y033303
P361C38381HW	CUSCINO VISCOFLEX 38 x 38 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 90 Kg BD/RDM: 1760478 CND: Y033303
P361C42421HW	CUSCINO VISCOFLEX 42 x 42 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 100 Kg BD/RDM: 1760487 CND: Y033303



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P361C42461HW	CUSCINO VISCOFLEX 42 x 46 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 110 Kg BD/RDM: 1760495 CND: Y033303
P361C45421HW	CUSCINO VISCOFLEX 45 x 42 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 110 Kg BD/RDM: CND: Y033303
P361C45461HW	CUSCINO VISCOFLEX 45 x 46 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 130 Kg BD/RDM: 1760510 CND: Y033303
P361C48431HW	CUSCINO VISCOFLEX 48 x 43 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 140 Kg BD/RDM: 1760514 CND: Y033303
P361C51461HW	CUSCINO VISCOFLEX 51 x 46 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 150 Kg BD/RDM: 1760518 CND: Y033303
P361C51501HW	CUSCINO VISCOFLEX 51 x 50 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 160 Kg BD/RDM: 1760542 CND: Y033303
P361CS42421HW	CUSCINO VISCOFLEX SOFT 42x 42 x 8 cm CON FODERA Portata terapeutica 70 Kg BD/RDM: 66271/R CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I



SPECIFICHE TECNICHE **Copertura**

Materiale della copertura	Fodera in Polymaille con base traspirante antiscivolo impermeabile ai liquidi e traspirante ad aria e vapore. Indicato per pazienti con problemi di incontinenza.
Materiale della copertura elemento terapeutico	Polymaille
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio