

SEDIA GIREVOLE PER VASCA

Ref. AB-31



Descrizione

Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato, seduta e schienale in Polietilene e fori per il deflusso dell'acqua. Appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.

Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

Destinazione d'uso

Ausilio per cura ed igiene personale, destinato a persone con ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y093303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	330616/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Struttura e braccioli in acciaio. Seduta e schienale in Polietilene. Appoggi per vasca in materiale plastico morbido.
Larghezza schienale	35 cm
Altezza schienale	36 cm
Altezza braccioli	20 cm
Distanza tra i braccioli	50 cm
Larghezza massima	73 cm
Peso	5,5 kg
Portata	100 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento del dispositivo sui bordi della vasca ed il serraggio delle viti laterali. Controllare lo stato delle coperture in materiale plastico morbido degli appoggi per vasca. Assicurarsi della stabilità della sedia verificando che la leva di bloccaggio posta sotto la seduta sia debitamente fissata nel foro della posizione desiderata. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente il funzionamento della leva di bloccaggio posta sotto la seduta. Controllare la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-31	Sedia girevole per vasca	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.1	28/12/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

