

BORSA GHIACCIO E ACQUA CALDA

Ref. PM-100



Descrizione

Borsa multiuso per ghiaccio e per acqua calda, realizzata in Poliuretano Termoplastico, semplice da utilizzare con un tappo di chiusura ermetica a vite.

Destinazione d'uso

Borsa indicata per la terapia antalgica e termoterapia.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V0401	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1249651/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Bihua Industry Corp.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Y. Sung Handelsvertretung	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Diametro	28 cm
Capacità	2300 cc
Materiale	Poliuretano Termoplastico

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
 Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
 qualità aziendale certificato:
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	<p>Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.</p> <p>Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura compresa tra -30°C e +60°C.</p> <p>Quando si utilizza la borsa per la terapia del calore, riempirla prima con acqua fredda poi con acqua calda.</p> <p>Porre particolare attenzione alle variazioni di calore della borsa durante l'applicazione su persone con una scarsa sensibilità al calore o con circolazione sanguigna carente.</p> <p>Non mettere la borsa a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.</p>
CONSERVAZIONE	<p>Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.</p> <p>Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alla polvere.</p>
MANUTENZIONE E PULIZIA	<p>Prima di utilizzare il dispositivo, la prima volta risciacquare l'interno della borsa con acqua tiepida e detergente neutro non aggressivo.</p> <p>Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente prima di avvitare il tappo e riporlo.</p> <p>In caso di inutilizzo prolungato, prima di riavvitare il tappo, lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa.</p>
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	<p>Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.</p>

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
PM-100	Borsa ghiaccio e acqua calda	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.2	08/06/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.